


D

EINSTELLUNG

- Verbinden Sie das Kabel Ihrer Telefonleitung mit dem Stecker vorn auf dem CL11 und stecken Sie dann den Stecker in die Wandsteckdose.
- Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem CL11 mit der mitgelieferten Kabelleitung.
- Auf der Nachtseite des CL11 befindet sich ein Schalter, mit dem die Klingel auf LEISE oder LAUT geschaltet werden kann.

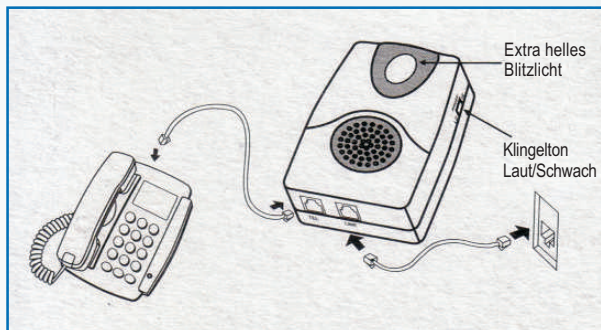

GEEMARC
CLEAR SOUND[®]
HEAR THE DIFFERENCE

Ringeramplifier / Amplificateur desonnerie / Klingelverstärker

CL11

geemarc[™]
Telecom SA

www.geemarc.com

Front side

Back side

GEEMARC

CLEAR SOUND[®]
HEAR THE DIFFERENCE

GB

- Telephone ringer alarm
- Extra loud ringer (95dB)
- Volume control (Hi / Lo)
- Visual ringer indicator
- Wall mountable
- No battery needed.

F

- Indicateur de sonnerie de téléphone
- Sonnerie électronique puissante (95dB)
- Réglage du volume (Fort / Faible)
- Indicateur lumineux de sonnerie
- Installation murale possible
- Fonctionne sans pile


D

- Telefon Klingelalarm
- Extralauter Klingelton (95dB)
- Lautstärkeregelung (Laut/Leise)
- Visuelle Klingelanzeige
- An der Wand montierbar
- Keine Batterien erforderlich

GB

USING


- Connect your telephone line cord to the socket located at front of CL11 then connect the plug into the wall socket.
- Connect your telephone to the CL11 with the line cord included.
- A switch located on the right side of the CL11 unit allows the ringer to be switched to LOW or HIGH.

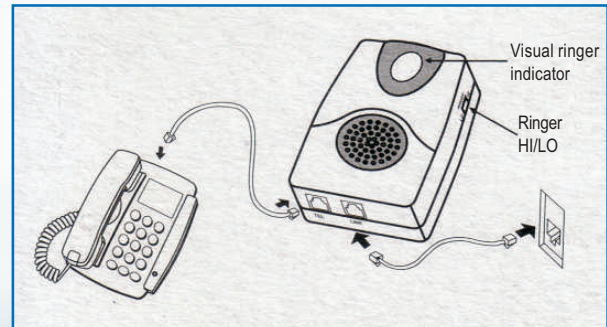

F

INSTALLATION

- Branchez votre ligne téléphonique dans la prise située à l'avant de votre CL11, puis l'autre extrémité dans votre prise téléphonique murale.
- Branchez votre téléphone à votre CL11 avec le cordon fourni.
- Un interrupteur situé sur le côté droit permet de régler le niveau Fort / Faible (HI/LO).

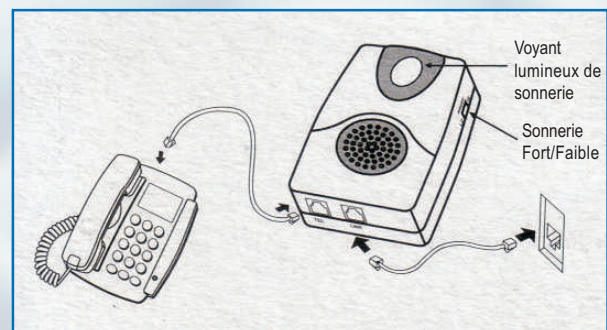**CL11**

geemarc[™]
Telecom SA

For product support and help :
44 (0)1707 384438
Tél. service après vente :
33 (0)3 28 58 75 99
Für den Produktsupport :
49 (0)69 96 21 76 35

Pantone 2905 C
(C 45, M 5, Y 0, K 0)

Pantone 2935 C
(C 100, M 52, Y 0, K 0)

geemarc
Telecom

CL11

ISSUE : 02

DATE : 26/03/ 2009

Blister Box

DOC. IDENT. :
BLCL11_v2.0