

SURFLINK™

EXTERNES MIKROFON 2



BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------------|----|
| Einleitung | 4 |
| ■ Genereller Gebrauch | 6 |
| ■ Übersicht Bedienelemente | 8 |
| ■ Betrieb | |
| Schwache Batterie und Wiederaufladen | 10 |
| EIN/AUS Schieber | 12 |
| Synchronisierung | 13 |
| Eingebaute Mikrofone | 15 |
| LED | 16 |
| Wie es getragen wird | 17 |
| Audioübertragung | 18 |
| Zusammenspiel mit weiterem Zubehör | 19 |
| ■ Fehlerbehebung | 20 |
| ■ Regulatorien | 22 |

Einleitung

Das **SurfLink externe Mikrofon 2** wurde entwickelt, um Sprache und Geräusche direkt in die Hörgeräte mit 900 MHz Funktechnologie zu übertragen. Wird es von einem Sprecher getragen, der in einer geräuschvollen Umgebung weit entfernt ist, unterstützt das SurfLink externe Mikrofon 2 das Verstehen, indem der Sprecher direkt in die Hörgeräte übertragen wird.

Streaming – Audiosignale oder andere Geräusche und Sprache werden von dem SurfLink externen Mikrofon 2 in die funkfähigen Hörgeräte übertragen.


Verpackungsinhalt

- SurfLink externes Mikrofon 2
- USB-zu-Micro-USB-Ladekabel
- Netzstecker
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Ladeadapter für das Auto
- Umhängekordel

Typische Situation

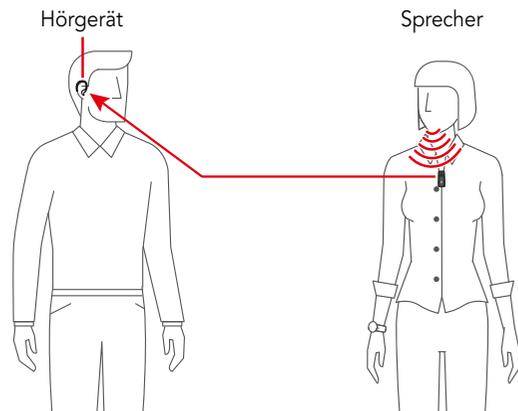

Genereller Gebrauch

SurfLink externes Mikrofon 2 schnell in Betrieb setzen:


1. Schalten Sie das SurfLink externe Mikrofon 2 ein. Die grüne LED leuchtet für 2 Sekunden.



2. Drücken Sie auf das „Sync“-Symbol auf dem Schieber, bis die LED beginnt, für 5 Sekunden schnell blau zu blinken.




3. Öffnen Sie die Batterielade des einen Hörgerätes, legen Sie eine Batterie ein und schließen Sie sie wieder. Die grüne LED blinkt als Bestätigung für eine erfolgreiche Synchronisation.

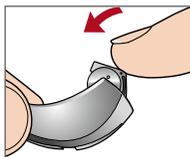


Wenn Sie nur ein Hörgerät haben, warten Sie 20 Sekunden, bis die rote LED blinkt.


Bei zwei Hörgeräten öffnen Sie die Batterielade des zweiten Gerätes, legen Sie eine Batterie ein und schließen Sie sie wieder. Die grüne LED blinkt als Bestätigung für eine erfolgreiche Synchronisation.

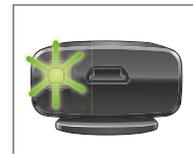

4. Jedes Gerät sollte automatisch mit dem Audio Streaming beginnen. Die blaue LED blinkt langsam, wenn das Audio Streaming aktiv ist.

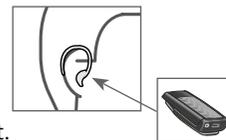


5. Lassen Sie einen Sprecher das SurfLink externe Mikrofon 2 im Abstand von 20 cm zu seinem Mund an seiner Kleidung befestigen.

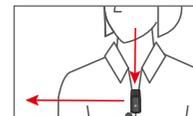

6. Zum Beenden der Übertragung schalten Sie das SurfLink externe Mikrofon 2 aus.



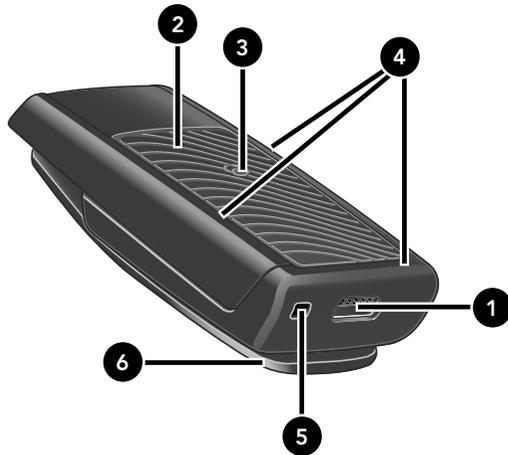

Übersicht Bedienelemente

1. Micro-USB-Buchse zum Wiederaufladen

Wiederaufladen über das Batterie-Ladekabel.

2. EIN/AUS Schieber

- Bewegen des Schiebers zur Micro-USB-Buchse hin schaltet das SurfLink externe Mikrofon 2 ein.
- Bewegen des Schiebers von der Micro-USB-Buchse weg schaltet das SurfLink externe Mikrofon 2 aus.

3. Synchronisierung

Stellt die Verbindung zwischen dem externen Mikrofon und den Hörgeräten her.

4. Eingebaute Mikrofone

Nehmen den Schall auf und übertragen ihn zu den Hörgeräten.

5. LED-Anzeige

Erkennt den aktuellen Status des SurfLink externen Mikrofons 2.

6. Clip

Befestigt das SurfLink externe Mikrofon 2 an der Kleidung.

Betrieb

Schwache Batterie und Wiederaufladen


Wenn das SurfLink externe Mikrofon 2 eingeschaltet ist und erkennt, dass die Batterie schwach ist, blinkt die LED langsam rot und das Gerät sendet einen Hinweiston zum Hörgerät. Dieser Ton unterscheidet sich deutlich von dem Ton, der erklingt, wenn die Batterie im Hörgerät schwach ist, so dass keine Verwechslungen vorkommen können. Ist die Batterie im SurfLink externen Mikrofon 2 schwach, ertönt der entsprechende Hinweiston ca. alle 5 Minuten, bis das SurfLink externe Mikrofon 2 automatisch abschaltet oder an ein Ladegerät angeschlossen wird.

Wenn das SurfLink externe Mikrofon 2 richtig mit einer Stromquelle verbunden ist, ändert sich die LED für 2 Sekunden in Grün und der Ladevorgang beginnt automatisch. Ist das SurfLink externe Mikrofon 2 aus, blinkt die LED während des Ladevorgangs langsam in Grün. Sie leuchtet konstant grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ist das SurfLink externe Mikrofon 2 an, priorisiert die LED das Streaming und blinkt langsam in Blau. Der Ladevorgang wird im Hintergrund weiter ausgeführt.

HINWEIS – Das Laden des SurfLink externen Mikrofons 2 kann während des Streaming länger dauern und ist schneller, wenn das Gerät aus ist.


Lademöglichkeiten

Zum Wiederaufladen der Batterie stecken Sie das Micro-USB-Kabelende des Ladekabels in die Micro-USB-Buchse am SurfLink externen Mikrofon 2.

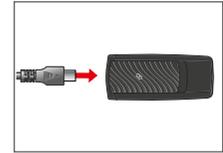


Über den direkten USB-Anschluss:

Stecken Sie das USB-Ende des Ladekabels in eine USB-Buchse, z.B. an einem Computer.

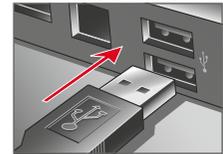

Über den Netzstecker:

Das SurfLink externe Mikrofon 2 kann auch über einen Netzadapter an einer Netzsteckdose aufgeladen werden. Stecken Sie hierzu das USB-Ende des Ladekabels in den Netzsteckeradapter.

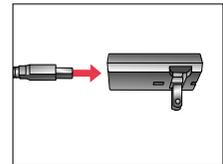

Ladeadapter für das Auto

Das SurfLink externe Mikrofon 2 kann mit einem Ladeadapter für den Zigarettenanzünder im Auto geladen werden. Diese Adapter können Sie in den meisten Elektronikgeschäften kaufen. Sie können Sie auch von Ihrem Hörgeräteakustiker erhalten.



EIN/AUS Schieber

Einschalten – Zum Einschalten bewegen Sie den Schieber zum Micro-USB-Ende hin. Die LED leuchtet für 2 Sekunden grün als Bestätigung, dass das Gerät an ist.




Ausschalten – Zum Beenden des Audio Streaming bewegen Sie den Schieber vom Micro-USB-Ende weg, bis die leuchtend farbige Oberfläche sichtbar ist. Die LED leuchtet für 2 Sekunden rot als Bestätigung, dass das Gerät aus ist.



Synchronisierung

Die Synchronisation stellt eine Verbindung zwischen Ihren Hörgeräten und dem SurfLink externen Mikrofon 2 her. Damit die Hörgeräte ein gestreamtes Audiosignal empfangen können, müssen Sie sie zuerst mit dem SurfLink externen Mikrofon 2 synchronisieren. Die Synchronisation ist nur einmal notwendig. Das SurfLink externe Mikrofon 2 verbindet sich danach automatisch mit beiden Hörgeräten, sobald diese eingeschaltet sind und sich im drahtlosen Übertragungsbereich befinden.

Damit das SurfLink externe Mikrofon 2 mit der Synchronisation beginnt, drücken Sie 5 Sekunden lang auf das „Sync“-Symbol auf dem EIN/AUS Schieber, bis die LED beginnt, schnell blau zu blinken. Um ein Hörgerät mit dem SurfLink externen Mikrofon 2 zu synchronisieren, öffnen Sie die Batterielade am Hörgerät, legen eine Batterie ein und schließen sie wieder. Das SurfLink externe Mikrofon 2 führt 20 Sekunden lang eine aktive Synchronisation durch (erkennbar an der blinkenden blauen LED). Ist das erste Hörgerät synchronisiert, wird dies durch ein kurzes grünes Aufblinker angezeigt.

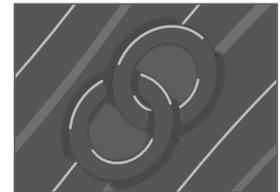

Nachdem das erste Hörgerät synchronisiert wurde, öffnen und schließen Sie die Batterielade des zweiten Hörgerätes. Warten Sie auf das grüne Aufblinken zur Bestätigung der Synchronisation.

Nach einer erfolgreichen Synchronisation der Hörgeräte bleibt das SurfLink externe Mikrofon 2 noch für weitere 20 Sekunden in einem aktiven Synchronisationsstatus bis die LED rot aufblinkt. Die Synchronisation ist abgeschlossen.

Nach einer erfolgreichen Synchronisation startet jedes Hörgerät automatisch mit dem Audio Streaming. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie die Synchronisation.


Zum Abbrechen des Synchronisationsbetriebs schalten Sie das SurfLink externe Mikrofon 2 aus und wieder ein.

Das SurfLink externe Mikrofon 2 kann höchstens mit einem rechten und einem linken Hörgerät synchronisiert werden. Werden Hörgeräte mit einem SurfLink externen Mikrofon 2 synchronisiert, werden andere zuvor synchronisierte Hörgeräte aus dem SurfLink externen Mikrofon 2 gelöscht.

Eingebaute Mikrofone

In Abhängigkeit von der Ausrichtung des SurfLink externen Mikrofons 2 im Raum wählt es automatisch die Mikrofoneinstellungen „Focus“ (direktional) oder „Surround“ (omnidirektional).

„**Focus**“ – Wenn das SurfLink externe Mikrofon 2 am Körper getragen wird, bevorzugt es automatisch den von oben kommenden Schall und reduziert gleichzeitig Schallpegel aus anderen Richtungen. Dies ist nützlich, um einem einzelnen Sprecher bei Hintergrundgeräuschen zuzuhören.

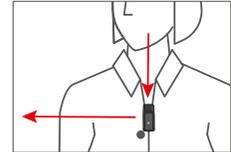

„**Surround**“ – Wenn das SurfLink externe Mikrofon 2 horizontal platziert wird (auf seinem Clip), empfängt es Schall aus allen Richtungen. Diese Einstellung ist nützlich, um mehreren Sprechern in der Nähe in einer ruhigen Umgebung zuzuhören.



HINWEIS – In lauten Umgebungen bewegen Sie das SurfLink externe Mikrofon 2 so nah wie möglich zur Schallquelle hin.

LED

Die LED-Anzeige liefert hilfreiche Informationen über das SurfLink externe Mikrofon 2:

| LED-ANZEIGE | STATUS SURFLINK EXTERNES MIKROFON 2 |
|--------------------------------|--|
| Aus | <ul style="list-style-type: none">• SurfLink externes Mikrofon 2 ist aus und nicht mit einer Stromquelle verbunden• Batterie im SurfLink externen Mikrofon 2 arbeitet nicht und muss geladen werden |
| Grün - konstant | <ul style="list-style-type: none">• Batterie voll geladen und SurfLink externes Mikrofon 2 ist aus |
| Grün für 2 Sekunden | <ul style="list-style-type: none">• SurfLink externes Mikrofon 2 erfolgreich eingeschaltet• Ladevorgang gestartet |
| Rot - langsam blinkend | <ul style="list-style-type: none">• Batterie schwach und SurfLink externes Mikrofon 2 ist an |
| Rot für 2 Sekunden | <ul style="list-style-type: none">• SurfLink externes Mikrofon 2 schaltet aus |
| Rot - schnell blinkend | <ul style="list-style-type: none">• Möglicherweise Fehler. Sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ nach. |
| Blau - langsam blinkend | <ul style="list-style-type: none">• SurfLink externes Mikrofon 2 überträgt gerade Audiosignale |
| Blau - schnell blinkend | <ul style="list-style-type: none">• SurfLink externes Mikrofon 2 - Synchronisation läuft |

Wie es getragen wird


Sie können das SurfLink externe Mikrofon 2 an der Kleidung befestigen oder an einer Umhängekordel tragen. Für eine bessere Übertragung sollte das SurfLink externe Mikrofon 2 einen Abstand von 20 cm zum Mund des Sprechers haben.

Clip – Drücken Sie leicht auf den Clip wie gezeigt. Schieben Sie die Öffnung des Clips über die Kleidung und lassen Sie ihn los. Achten Sie darauf, dass das SurfLink externe Mikrofon 2 sicher an der Kleidung befestigt ist.



Umhängekordel (optional) –

1. Drücken Sie den Clip leicht wie gezeigt.
2. Legen Sie die Schlaufe der Umhängekordel in die Öffnung des Clips und ziehen Sie sie nach oben. Achten Sie darauf, dass die Umhängekordel sicher am SurfLink externen Mikrofon 2 befestigt ist.

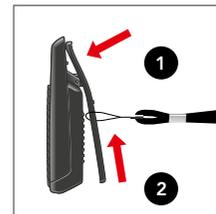

Sie erhalten Umhängekordeln bei Ihrem Hörgeräteakustiker.

HINWEIS – Um einen besseren Signal-Rausch-Abstand zu haben, kann Ihr Hörgeräteakustiker die Mikrofone Ihrer Hörgeräte für die Nutzung des SurfLink externen Mikrofons 2 einstellen (stumm oder gedämpft).

Audioübertragung

Nach dem Einschalten des SurfLink externen Mikrofons 2 beginnt dieses automatisch mit der Audio-Übertragung zu synchronisierten Hörgeräten. Die LED blinkt langsam blau als Bestätigung, dass das Audio Streaming aktiv ist und die Batterie im SurfLink externen Mikrofon 2 funktioniert.

Wenn Sie das SurfLink externe Mikrofon 2 ausschalten, stoppt das Audio Streaming automatisch und die Hörerätafunktion wird wieder übernommen. Der Nutzer kann den Pegel des übertragenen Audiosignals über seine Höreräte einstellen. Das SurfLink externe Mikrofon 2 verfügt nicht über einen integrierten Lautstärksteller.

HINWEIS – Probieren Sie doch einmal, Ihr SurfLink externes Mikrofon 2 vor dem Lautsprecher des Fernsehers zu platzieren. Hierdurch können Sie den Fernsehton direkt in die Höreräte übertragen. Stellen Sie sich die gewünschte Lautstärke direkt am TV ein.

Zusammenspiel mit weiterem Zubehör

Wenn Sie auch eine SurfLink Mobile 2 nutzen, hat ihre Übertragung eines Telefongesprächs Vorrang vor der Audioübertragung des SurfLink externen Mikrofons 2. Ist das Telefongespräch über SurfLink Mobile 2 beendet, wird die Audioübertragung des SurfLink externen Mikrofons 2 zu den Hörgeräten automatisch fortgesetzt.

Von SurfLink externem Mikrofon 2 und SurfLink Media 2 übertragene Audiosignale werden gleich behandelt. Das zuerst verfügbare Signal wird bevorzugt.

Wenn Sie die SurfLink Fernbedienung oder die SurfLink Mobile 2 zur Einstellung Ihrer Höreräte nutzen, werden die Befehle auch weiterhin zu Ihren Hörgeräten gesendet.

Fehlerbehebung

| SYMPTOM/PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | MÖGLICHE LÖSUNG |
|--|--|---|
| Ein (oder beide) Hörgeräte brechen plötzlich die Audioübertragung ab. | Hörgeräte sind evtl. am Rand des drahtlosen Übertragungsbereichs. | Bewegen Sie sich näher zum SurfLink externen Mikrofon 2 hin. |
| | Batterie im Hörgerät ist zu schwach für die Audioübertragung. | Ersetzen Sie die Batterie im Hörgerät durch eine neue. |
| | Ein großes Objekt wie z.B. ein Möbelstück oder eine Wand schwächt das Signal. | Für die bestmögliche Übertragung sollten Ihre Hörgeräte in einer Sichtlinie zum SurfLink externen Mikrofon 2 sein. |
| | Veraltete Software im Hörgerät. | Ihr Hörgeräteakustiker kann Ihre Hörgeräte mit der neuesten Software aktualisieren. |
| LED blinkt langsam in blau, aber es sind keine übertragenen Audiosignale in den Hörgeräten hörbar. | Hörgeräte befinden sich nicht im drahtlosen Übertragungsbereich. | Bewegen Sie sich näher zum SurfLink externen Mikrofon 2 hin. |
| | Die Hörgeräte sind nicht richtig mit dem SurfLink externen Mikrofon 2 synchronisiert. | Synchronisieren Sie Ihre Hörgeräte mit dem SurfLink externen Mikrofon 2. |
| | Batterie im Hörgerät ist zu schwach für die Audioübertragung. | Ersetzen Sie die Batterie im Hörgerät durch eine neue. |
| LED blinkt kontinuierlich schnell rot. | Möglicherweise Fehler. | Schalten Sie das SurfLink externe Mikrofon 2 aus, warten Sie 15 Sekunden und schalten Sie es wieder ein. |
| Schwierigkeit, einen Sprecher in einer lauten Umgebung zu hören. | Signal-Rausch-Abstand des aktuellen Hörprogramms nicht leistungsfähig genug. | Schalten Sie auf das Hörprogramm um, das Ihr Hörgeräteakustiker für das SurfLink externe Mikrofon 2 optimiert hat. |
| | SurfLink externes Mikrofon 2 ist evtl. nicht für eine optimale Übertragung positioniert. | Richten Sie das SurfLink externe Mikrofon 2 neu im Raum aus, indem Sie es um ein paar Grad nach rechts oder links drehen. |
| | SurfLink externes Mikrofon 2 ist evtl. zu weit vom Sprecher entfernt. | Bewegen Sie das SurfLink externe Mikrofon 2 näher zum Mund des Sprechers. |

Regulatorien

Wichtige Information



Abfall von elektronischen Geräten muss entsprechend den lokalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Hinweise zur Entsorgung alter elektronischer Gerätes

Starkey Hearing Technologies unterstützt und Gesetze Ihrer lokalen Gemeinden fordern evtl., dass Sie Ihr SurfLink externes Mikrofon 2 gemäß den Abläufen für Recycling/Entsorgung vor Ort entsorgen.

Die Anweisungen unten sind als Hinweis für das Entsorgungs-/Recycling-Personal vorgesehen. Bitte legen Sie diese Bedienungsanleitung zu Ihrem SurfLink externen Mikrofon 2, wenn Sie es entsorgen.

Nur für Entsorgungs-/Recycling-Personal

Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie:

- Schalten Sie das SurfLink externe Mikrofon 2 aus.
- Schieben Sie einen kleinen Schraubendreher in die Spalte auf der Seite des Gehäuses direkt über der Clipfeder und drücken die Gehäusehälften auseinander.
- Ziehen Sie den Batteriestecker von der Platine ab, um einen versehentlichen Kurzschluss zu vermeiden.
- Heben Sie die Batterie von der Rückplatte mit einer flachen Klinge ab.

Verwendungszweck

Das SurfLink externe Mikrofon 2 ist als Anwendungsteil Typ B nach IEC 60601-1 für medizinische elektrische Geräte klassifiziert.

Das SurfLink externe Mikrofon 2 ist so gestaltet, dass es die strengsten Normen der Internationalen Elektromagnetischen Kompatibilität erfüllt. Es ist aber trotzdem möglich, dass Interferenzen, verursacht durch die Netzspannung, Metall-detektoren am Flughafen, elektromagnetische Felder von anderen medizinischen Geräten, Radiosignalen und elektrostatischen Entladungen auftreten können.

Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen oder implantierbare medizinische Geräte tragen wie z.B. Defibrillatoren oder Herzschrittmacher und befürchten, dass Ihr SurfLink externes Mikrofon 2 evtl. Interferenzen mit Ihrem medizinischen Gerät verursacht, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker, um Informationen über das Risiko einer Störung zu erhalten.

Das SurfLink externe Mikrofon 2 sollte nicht bei einer MRT-Untersuchung getragen werden.

Das SurfLink externe Mikrofon 2 ist für folgende Temperaturbedingungen entwickelt:

- Betrieb: -10 bis +45 Grad Celsius (14 bis 113 F), relative Feuchtigkeit ≤ 95 %
- Laden der Batterie: 0 bis +45 Grad Celsius (32 bis 113 F), relative Feuchtigkeit ≤ 95 %
- Lagerung: -20 bis +63 Grad Celsius C (-4 bis 145 F)

Nutzung in Flugzeugen

Das SurfLink externe Mikrofon 2 sollte nicht in Flugzeugen genutzt werden, es sei denn, das Flugpersonal hat dies ausdrücklich erlaubt.

Internationaler Gebrauch

Das SurfLink externe Mikrofon 2 ist zum Gebrauch länderspezifischer Radiofrequenzen zugelassen und ist evtl. außerhalb Ihres Landes oder Ihrer Region nicht zugelassen. Bedenken Sie bitte bei Ihren internationalen Reisen, dass der Gebrauch des SurfLink externen Mikrofons 2 Störungen mit anderen elektronischen Geräten verursachen oder durch andere elektronische Geräte gestört werden kann.

WICHTIGE HINWEISE

Wir sind verpflichtet, Sie auf Folgendes aufmerksam zu machen:

- Die Nutzung des SurfLink externen Mikrofons 2 direkt neben anderen elektronischen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu einer eingeschränkten Leistung führen kann. Ist eine solche Verwendung notwendig, achten Sie darauf, ob Ihr Gerät und/oder das elektronische Gerät normal funktionieren.
- Die Verwendung von Zubehör, Komponenten oder Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller für dieses Gerät zugelassen sind, können zu einer erhöhten elektromagnetischen Emission und einer verringerten elektromagnetischen Immunität führen. Eine verminderte Leistungsfähigkeit kann die Folge sein.
- Werden mobile Funkübertragungsgeräte in einem Abstand von bis zu 30 cm zum SurfLink externen Mikrofon 2 verwendet, kann dies zu Leistungseinbußen führen. Sollte dies der Fall sein, erhöhen Sie den Abstand zwischen den beiden Geräten.

Die Batterie in Ihrem SurfLink externen Mikrofon 2 ist nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, sie zu wechseln.

Das SurfLink externe Mikrofon 2 ist mit einem Rating von 52 per IEC 60529. Sie ist vor Staub und vertikal (bis zu einem 15 Grad Winkel) einfallenden Wassertropfen geschützt.

Technische Beschreibung drahtlose Übertragung

Der Funksender Ihres SurfLink externen Mikrofons 2 arbeitet innerhalb des 902-928 MHz (Nordamerika) mit einer max. Strahlungsenergie von 20 dBm und Übertragungsmodulation vom Typ 508KF1D oder 863-865 MHz (EU) Frequenzbandes mit einer max. Strahlungsenergie von 10 dBm und Übertragungsmodulation vom Typ 342KFXD mit der Bandbreite von 300 kHz.

SurfLink externes Mikrofon 2 wurde getestet und entspricht folgenden Emissions- und Immunitätstests:

- IEC 60601-1-2 abgestrahlte Immunitätsanforderungen für ein Gruppe 1 Klasse B Gerät wie in CISPR 11 angegeben.
- RF-abgestrahlte Immunität bei einem Feldniveau von 10 V/m zwischen 80 MHz und 2,7 GHz sowie höheren Feldniveaus, wie in Tabelle 9 der IEC 60601-1-2 angegeben.
- Störfestigkeit für Magnetfelder bei einem Feldniveau von 30 A/m.
- Immunität auf ESD-Werte von +/- 8 kV geleitete Entladung und +/- 15 kV Luftentladung.

FCC/IC Information

FCC ID: EOA-CM
IC: 6903A-CM (Model 400)

FCC-/IC-Hinweis

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regelungen und der RSS 247. Der Betrieb ist Gegenstand folgender zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät verursacht keine schädlichen Interferenzen und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, darunter Störungen, die evtl. einen unerwünschten Betrieb verursachen.

HINWEIS: Der Hersteller ist nicht für Interferenzen durch Radios und Fernseher verantwortlich, die durch unautorisierte Modifikationen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Modifikationen könnten die Befugnis des Nutzers ungültig machen, das Gerät zu betreiben.

Hiermit erklärt Starkey Hearing Technology, dass das SurfLink externe Mikrofon 2 mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie bei den Adressen unten erhalten.

Starkey Hearing Technologies
6600 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA

EC REP

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom.



Die folgenden Symbole werden auf dem SurfLink externes Mikrofon 2 zur Dokumentation verwendet.

Dieses Gerät produziert und empfängt Hochfrequenz-Energie. Interferenzen können in der Nähe von Geräten auftreten, gekennzeichnet mit folgendem Symbol.



Gerät der Klasse II



Fachgerechte Entsorgung



Hinweise hierzu in der Bedienungsanleitung



