

# AMPLIDECT™ COMBI355

**Telefon Und Anrufbeantworter  
Mit Grossen Tasten Und  
Tonverstärker**



Deutsch

# INHALTE

!!! Sehen Sie auf unserer Webseite [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) nach, ob eine aktualisierte Fassung dieser Bedienungsanleitung erhältlich ist  
!!!

<b>INHALT</b> .....	<b>1</b>
<b>EINLEITUNG</b> .....	<b>6</b>
Das Telefon auspacken.....	7
<b>BESCHREIBUNG</b> .....	<b>8</b>
Allgemeine Beschreibung.....	8
<b>BESCHREIBUNG MOBILTEIL</b> .....	<b>10</b>
Tastenbeschreibung.....	10
<b>BESCHREIBUNG (BASIS)</b> .....	<b>11</b>
<b>BESCHREIBUNG (MOBILTEIL &amp; BASIS)</b> .....	<b>13</b>
LCD Bildschirm Beschreibung.....	13
LCD Bildschirm Navigation.....	14
Menü Abbildung (Mobilteil) .....	14
Menü Abbildung (Basis) .....	15
<b>INSTALLATION (Mobilteil)</b> .....	<b>16</b>
Aufstellung .....	16
Einrichtung .....	16
Batteriegebrauch.....	17
Mobilteil Trageclip .....	17
<b>INSTALLATION (Basis)</b> .....	<b>18</b>
Einrichtung .....	18
Wandmontage.....	18
<b>MOBILTEIL EINSTELLUNGEN</b> .....	<b>19</b>
AN/AUS Einstellungen .....	19
Alarm Einstellung .....	19
Audio Einrichten .....	20
Klingel Einrichten .....	20
Tastaturton Einrichten .....	22
Abgrenzungsalarm .....	22
Spracheinstellungen.....	23
Mobilteil benennen .....	24
Automatische Rufannahme .....	24
Kontrast einrichten .....	25
Datum & Zeit .....	26

# INHALTE

Basis auswählen .....	27
Mobilteil zurücksetzen .....	28
Verstärkung Einstellen .....	28
Tastensperre.....	29
<b>GRUNDEINSTELLUNGEN VOM MOBILTEIL .....</b>	<b>30</b>
Mobilteil abmelden .....	30
Einstellung Wahlverfahren .....	30
Flash Time Einstellung .....	31
PIN ändern.....	31
Basis Standardeinstellung .....	32
<b>BASIS EINSTELLUNGEN.....</b>	<b>33</b>
Mobilteil abmelden .....	33
Audio Einrichten .....	34
Klingel Einrichten .....	35
Tastaturton Einrichten .....	36
Spracheinstellungen.....	37
Kontrast einrichten .....	37
Datum & Zeit .....	38
Einstellung Wahlverfahren .....	39
Flash Time Einstellung .....	40
PIN ändern.....	40
Basis Standardeinstellung.....	41
<b>BENUTZUNG DES TELEFONS (Mobilteil) .....</b>	<b>42</b>
Anrufen .....	42
Vorwählen .....	42
Anruf erhalten .....	42
Freisprechen .....	43
Stummfunktion .....	43
Annahmelautstärke .....	43
Letzte Nummer Wiederwahl .....	44
Wiederwahl kürzlicher Nummern.....	44
Hinzufügen kürzlicher Nummern ins Telefonbuch .....	45
Löschen kürzlicher Nummern.....	46
Flash Signal .....	47
Hörgerätbenutzung .....	47
Paging das Mobilteil .....	47
Anruf-Timer.....	47
<b>BENUTZUNG DES TELEFONS (BASIS).....</b>	<b>48</b>
Anrufen .....	48

# INHALTE

Vorwählen .....	48
Anruf erhalten .....	64
Freisprechen .....	48
Stummfunktion .....	49
Letzte Nummer Wiederwahl .....	49
Wiederwahl kürzlicher Nummern .....	50
Hinzufügen kürzlicher Nummern ins Telefonbuch .....	50
Löschen kürzlicher Nummern .....	50
Flash Signal .....	50
Hörgerätbenutzung .....	50
Anruf Timer .....	50
<b>SONDERZUBEHÖR (MOBILTEIL) .....</b>	<b>51</b>
Kopfhörer benutzen .....	51
<b>ANRUFER ID .....</b>	<b>52</b>
Anrufer ansehen im ID Buch .....	52
Eine Nummer aus dem Anrufer ID Buch wählen .....	52
Hinzufügen einer Nummer vom Anrufer ID Buch ins Telefonbuch .....	53
Löschen einer Nummer aus dem Anrufer ID Buch .....	54
Löschen aller Nummern aus dem Anrufer ID Buch .....	54
<b>TELEFONBUCH .....</b>	<b>55</b>
Telefonbucheintrag erstellen .....	55
Zeige Telefonbucheinträge .....	56
Telefonbucheintrag wählen .....	56
Telefonbucheintrag verändern .....	57
Telefonbucheintrag löschen .....	58
Alle Telefonbucheinträge löschen .....	58
Telefonbuch Status .....	59
<b>KURZWahl (MOBILTEIL) .....</b>	<b>60</b>
Kurzwahlnummer erstellen .....	60
Kurzwahlnummer anzeigen .....	60
Kurzwahlnummer wählen .....	60
Kurzwahlnummer verändern .....	61
Kurzwahlnummer löschen .....	62
<b>KURZWahl (BASIS) .....</b>	<b>63</b>
Kurzwahlnummer erstellen .....	63
Zeige/Wähle eine Kurzwahlnummer .....	63
<b>ZUSÄTZLICHE MOBILTEILE &amp; BASEN .....</b>	<b>64</b>
Neues Mobilteil anmelden .....	64

# INHALTE

Basis auswählen .....	64
Mobilteil abmelden .....	64
Interne Anrufe .....	64
Anrufverbindung zwischen Mobilteilen .....	66
Drei-Wege-Konferenz-Anruf .....	67
<b>ANKLOPFEN.....</b>	<b>68</b>
Anrufer ID beim Anklopfen .....	68
<b>ANRUFBEANTWORTER .....</b>	<b>69</b>
Einstellen des Anrufbeantworters An/Aus.....	69
Basis benutzen um Anrufbeantworter einzustellen An/Aus.....	69
Der Anrufbeantworter-Hinweis .....	70
Ansage 1 und Ansage 2.....	70
Aufnahme Ansage 1 .....	70
Aufnahme Ansage 2.....	71
Benütze die Basis um Ansage 1 & Ansage 2 aufzunehmen .....	72
Ausgehende Nachricht überprüfen.....	72
Benütze die Basis um Ansage 1 & Ansage 2 abzuspielen.....	72
Ausgehende Nachricht wiederherstellen .....	72
Benütze die Basis um ausgehende Nachrichten wiederherzuzust. ....	73
Anrufbeantworter-Modus.....	73
Anrufbeantworter-Einstellungen .....	74
Sprachauswahl der Ansage .....	75
Nachrichten abfragen über das Menü .....	75
Nachrichten abfragen über die Basis.....	76
Anruf aussieben .....	76
Löschen aller Nachrichten.....	77
Benütze die Basis um alle Nachrichte zu löschen .....	77
Benutzung des Anrufbeantworters mit Fernabfrage .....	77
Fernabfrage Code .....	77
Fernbedienung.....	78
Fernbedienung-Befehle.....	78
Aufnahme einer Kurzmitteilung .....	79
Speicher ist voll.....	79
Anrufbeantworter zurücksetzen.....	80
<b>PROBLEMLÖSUNG (Mobilteil).....</b>	<b>81</b>
<b>PROBLEMLÖSUNG (Basis).....</b>	<b>83</b>
<b>SICHERHEITSINFORMATION.....</b>	<b>84</b>
<b>GARANTIE .....</b>	<b>85</b>
<b>RECYCLINGANWEISUNGEN.....</b>	<b>86</b>

# EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc AMPLIDECT™ COMBI355. Ein Multifunktions-Telefon, das Funktionen wie Freisprechen, Clip Funktion\*, ein Telefonbuch und Anrufbeantworter bietet. Es bietet eine Verstärkung, hilfreich für Menschen mit Hörbehinderung. Es hat große Tasten, welche leicht zu sehen sind beim Bedienen der Tastatur und das Verwählen unmöglich macht. Es gibt Foto-Direktwahltasten, entworfen um Wählen einfacher zu machen, da Sie anhand der Fotodirektwahltasten mit den Bildern Ihrer Freunde leichter zu finden sind. Zusammen mit dem oben genannten gibt es auch ein schnurloses Telefon. Dieses Telefon bietet alle Vorteile der schnurlosen Technologie (kompatibel mit dem Digital Verbesserten Schnurlosen Telekommunikations-DECT-Standard) zusammen mit einer einfach zu sehenden Großtastentastatur, ideal für denjenigen, der unter schlechtem Sehen zu leiden hat. Das gesamte Telefonpaket ist mit Hörgeräten kompatibel.

Es ist wichtig, dass Sie die nachstehenden Anweisungen lesen, um das volle Potential Ihres Geemarc-Telefons auszunutzen zu können. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Dieses Handbuch erklärt Ihnen wie das folgende Telefon verwendet wird:  
AMPLIDECT™ COMBI355

\*Um die Einrichtung der Rufnummeranzeige zu benützen, müssen Sie von Ihrem Netzbetreiber die Rufnummernanzeige einrichten lassen.

# ANLEITUNG

## Das Telefon auspacken

---

Wenn Sie das AMPLIDECT™ COMBI355 auspacken, sollten Sie folgendes in der Schachtel vorfinden.

- 1 AMPLIDECT™ COMBI355 Gerät
- 1 AMPLIDECT™ COMBI355 Hörer mit gewelltem Kabel
- 1 AMPLIDECT™ COMBI355 Mobilteil
- 1 AMPLIDECT™ COMBI355 Basis
- 3 x AAA Ni-MH Akkus
- 1 Telefon-Netzkabel
- 2 Netzanschluss-Adapter
- 1 Trageclip
- 1 Bedienungsanleitung




Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter  
**[www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)**

Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**

# BESCHREIBUNG



## Allgemeine Beschreibung

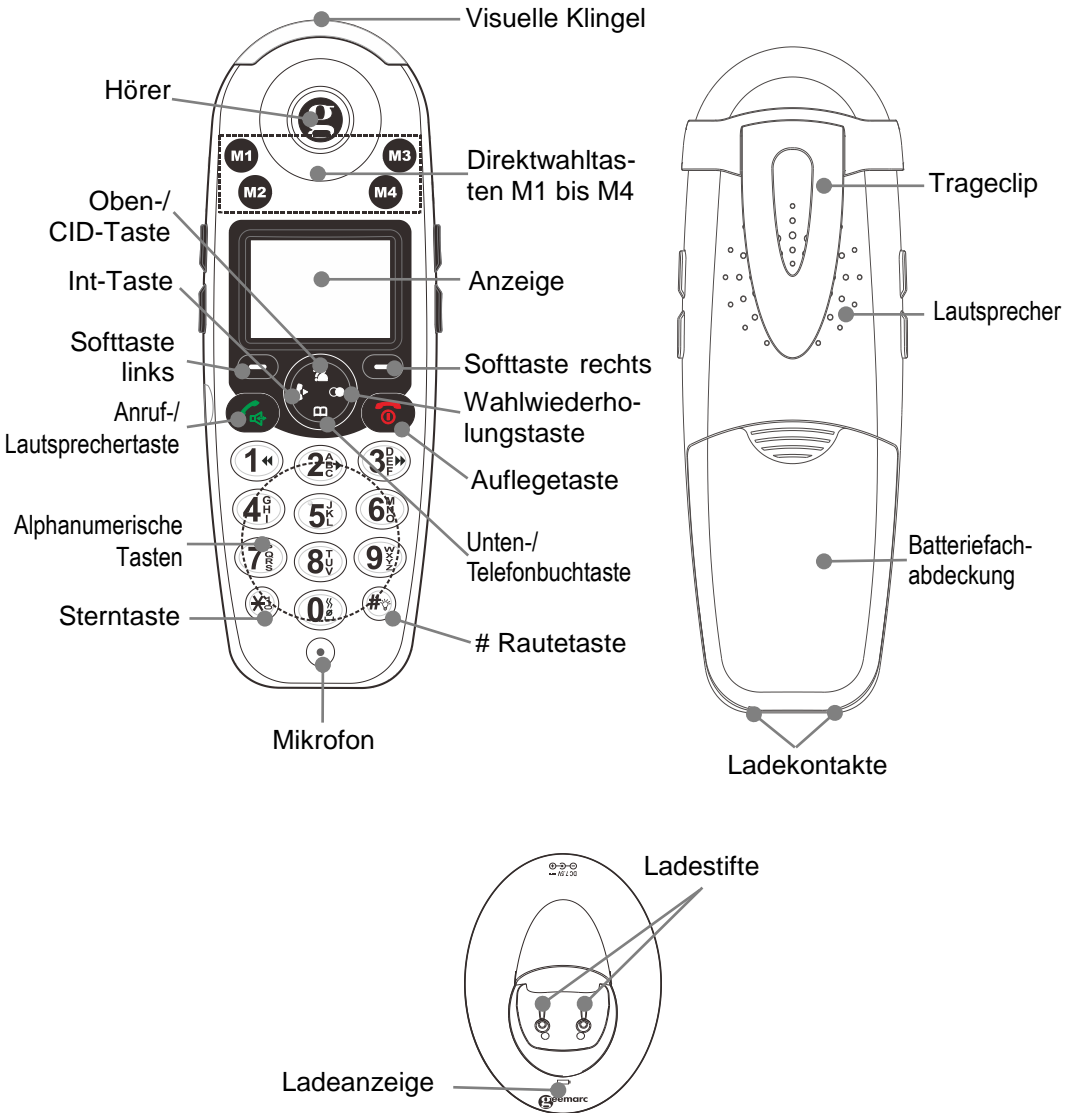







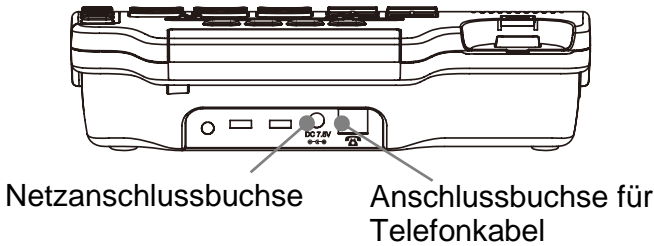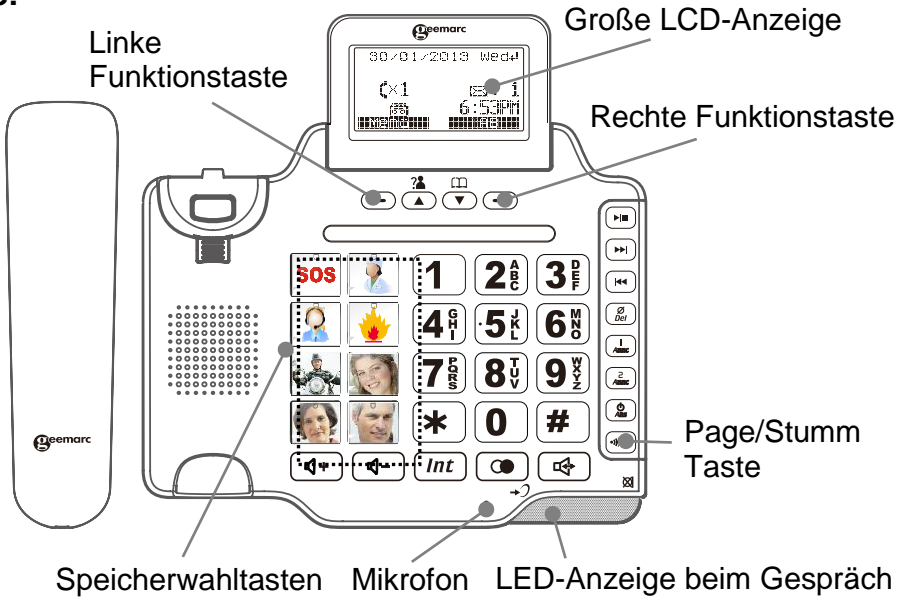





# BESCHREIBUNG

## Base:





# BESCHREIBUNG (MOBILTEIL)









## Tastenbeschreibung

	<p><b>Wahl/Lautsprecher Taste</b> Machen/Beantworten eines Gesprächs Aktiviert den Freisprecher wenn es während eines Gesprächs gedrückt wird</p>
	<p><b>Beenden/Power Taste</b> Gespräch beenden. Lang drücken um das Tel. ein oder auszusch.</p>
	<p><b>Navigation Taste</b></p> <p> <b>Aufwärts/CID Taste</b> Blättern Sie nach oben durch Listen und Menüoptionen. Erhöhen Sie die Hörer/Lautsprecher Lautstärke während eines Anrufs. Betreten Sie das Anrufer-ID-Buch.</p> <p> <b>Abwärts/Telefonbuch Taste</b> Blättern Sie nach unten durch Listen und Menüoptionen. Verringern Sie die Hörer/Lautsprecher Lautstärke während eines Anrufs. Betreten Sie das Telefonbuch.</p> <p> <b>INT Taste</b> Bauen Sie ein inter. Gespr. an ein anderes MT auf. Verb. Sie einen eingeh. Anruf an ein anderes MT. Bauen Sie eine Telefonkonf. mit einer exter. Leitung u. einem inter. MT auf.</p> <p> <b>Wiederwahl Taste</b> Betreten des Wiederwahlbuches. Legen Sie eine Pause ein, wenn Sie eine Nr. wiederwählen.</p>
 	<p><b>Weich Tasten (links und rechts)</b> Führen Sie Auswählen &amp; Aktionen durch, die durch den Zusammenhang abhängig auf dem Display des Mobilteils oben angezeigt werden.</p>
	<p><b>Stern Taste</b> Drücken und Halten um die Tastatursperre ein/aus zuschalten. Einrichten einer Konferenzschaltung.</p>
<b>M1 bis M4</b>	<p><b>Kurzwahl</b> Die vier Tasten sind Direktwahltasten.</p>

# BESCHREIBUNG (BASIS)

	Drücken Sie lange, um die Vibration und LED bei eingehenden Gesprächen einzuschalten
	Drücken Sie lange, um das LED einzuschalten

## Tastenbeschreibung

	<b>Lautsprecher Taste</b> Machen/Beantworten/Beenden eines Gespr. Aktiv. den Freispr. wenn es während eines Gespr. gedr. wird.
	<b>Wiederwahl Taste</b> Betr. des Wiederwahlb. Legen Sie eine Pause ein, wenn Sie eine Nr. wiederw.
	<b>INT Taste</b> Bauen Sie ein inter. Gespr. an ein anderes MT auf. Verb. Sie einen eingeh. Anruf an ein anderes MT. Bauen Sie eine Telefonkf. mit einer exter. Leit. u. einem inter. MT auf.
	<b>Lautstärke rauf/runter Taste</b> Benutze diese um die Lautst. der Kling., Lautspr. u. des Hör. einzuste
<b>M1 bis M8</b>	<b>Fotowahl</b> Die acht Tasten sind Schnellwahl.
	<b>Weich Tasten</b> Sie erfüllen die Funkti. angez. durch den Text über ihnen ( in der unteren Zeile des Displays) welche vom Zusammenh. abhängig sind.
	<b>Aufwärts/CID Taste</b> Durch Listen u. Menüoptionen blättern. Verstärken von Hörer/Lautspr. währ. eines Gespr. CID Buch betreten
	<b>Herunter/Telefonb.taste</b> Blättern Sie nach unten durch Listen und Menüoptionen Abnahme Hörer/Lautsprecher Lautst. während eines Gesprächs Tel.buch betreten.
	<b>Ansage an/aus Taste</b> Drücken um den AB an/aus zu schalten. Das Telefon

# BESCHREIBUNG (BASIS)



	wird 'Ansage an' oder 'Ansage aus' ansagen.
	<b>Abspielen/Stop Taste</b> Drücken zum starten oder stopen der Nachricht oder Notiz
	<b>Überspringen Taste</b> Drücken um nächste Nachricht abzuspielen.
	Drücken um vorherige Nachricht abzuspielen.
	<b>Löschen Taste</b> Beim abspielen einer Nachr. Taste drücken um die augenblickliche Nachr. zu löschen. In Stand-by, drücken und halten um alle Nachr. zu löschen.
 	<b>Ansage1/Ansage 2 Taste</b> Drücken um Ansage1 oder Ansage 2 abzuspielen. Drücken und halten um Ansage1 oder Ansage 2 aufzunehmen.
	<b>Page/Stumm Taste</b> Findet einen angem. Hörer. Registr. einen neuen Hörer. Stummtaste während eines Anrufes.



# BESCHR. (MOBILTEIL & BASIS)

## LCD Bildschirm-Beschreibung

	<b>Symbol für die Signalstärke</b> Dies zeigt immer an, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Es zeigt die aktuelle Signalstärke. Mehr Balken zeigen mehr Signalstärke. Ist das Mobilteil zu weit von der Basis entfernt, blinkt das Symbol.
	<b>Leitungs Symbol</b> Zeigt an, dass die Leitung besetzt ist i.e. Telefon ist abgeh.
	<b>Freisprecher</b> Zeigt an, dass der Freisprecher aktiviert ist.
	<b>Neuer Anruf Symbol</b> Zeigt an, dass Sie einen oder mehrere Anrufe verpasst haben.
	<b>Tastensperre Symbol</b> Zeigt an, dass die Tasten gesperrt sind.
	<b>Batterie Status Symbol</b> Zeigt immer an, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Zeigt den Level der Batteriestärke. Mehr Balken bedeuten mehr Batteriestärke.
	<b>Eingehende Nachricht Symbol (Mobilteil)</b> Zeigt an, es gibt neue Nachrichten.
	<b>Eingehende Nachricht Symbol (Basis)</b> Zeigt an, es gibt neue Nachrichten.
	<b>Alarm Symbol (Mobilteil)</b> Zeigt an, dass ein Alarm zu einer bestimmten Zeit klingelt.

## LCD Bildschirm-Navigation


Die  (**link. Seit.**) Tast. aktiviert das Menü. Das  (Mobilte.) oder 'Zurück' (Basis) wird verwendet, um das Menü zu deaktivieren, und um in den Standby-Modus zu gelangen egal in welchem Menü Sie sich befinden.


Das  und  Taste wird verwendet um durch das Menü zu blättern.



# BESCHR. (MOBILTEIL & BASIS)

 : rückwärts bewegen durch das Menü.

 : vorwärts bewegen durch das Menü.

Die  (**linke Seite**) Taste wird auch verwendet, um eine Aktion oder eine Wahl auf einem Bildschirm auszuwählen.

Die  (**rechte Seite**) Taste wird verwendet um einen Ablauf/Eingabe zu löschen.

Wenn Sie die  (**rechte Seite**) innerhalb jedem Menüs drücken (ausser während der Zahl des Eingabemodus), kehrt das Telefon zum vorherigen Bildschirm zurück. Wenn Sie drücken und halten  (**rechte Seite**) innerhalb jedem Menüs (ausser während der Zahl des Eingabemodus), kehrt das Telefon in den standby Modus zurück (nur das Mobilteil).

Das Telefon kehrt automatisch in den standby Modus zurück, wenn innerhalb 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

## Menü Abbildung (Mobilteil)

Über das Menü kann man folgende Einstellungen vornehmen:

Menü-**MT EINSTELL.** Ruf ton - **RUFTON EXT(ern)**: Melodie und Lautstärke

Menü-**MT EINSTELL.** Ton **EINST(ellungen)**.: Tastenton und Reichweite (= Ausser Bereich)

Menü-**MT EINSTELL.** Audio Einstellungen: Lautsp(recher) lau(tstärke) und Hörerlauts(tärke)

<b>Anrufer ID Buch</b>	
<b>Telefonbuch</b>	Neu
	Bearbeiten
	Löschen
	Alle löschen
	TB Status
<b>BS Einstellungen</b>	Anschliessen Mobilteil (MT)
	Wahlmodus
	Flash Time
	Ändern PIN
	BS Zurücksetzen
<b>MT Einstellungen</b>	Alarm
	Audio Einst.(ellungen)
	Rufton Einst.(ellungen)

# BESCHR. (MOBILTEIL & BASIS)

	Ton Einst (ellungen)
	Sprache
	MT Name
	Auto Annahme
	Kontrast
	Datum & Zeit
	Basis Wahl
	MT Zurücksetzen
	Verstärkt
<b>Registration</b>	

## Menü Abbildung (Basis)

---

<b>CID Buch</b>	
<b>Telefonbuch</b>	Neu
	Bearbeiten
	Löschen
	Alle löschen
	TB Status
<b>BS Einstellungen</b>	Anschliessen MT
	Audio Einrichten
	Klingel Einrichten
	Tasten Einrichten
	Sprache
	LCD Kontrast
	Datum & Zeit
	Wahlmodus
	Flash Time
	Ändern PIN
	BS Zurücksetzen
<b>AB</b>	Anzeige
	Nachricht
	TAM Einstellung

# INSTALLATION (MOBILTEIL)

## Aufstellung

---

Achten Sie darauf, dass das Telefon nah genug an der Steckdose ist, damit das Kabel ohne Strecken leicht zu erreichen ist. Außerdem muss das Stromnetz leicht zugänglich sein, damit Sie, wenn nötig, die Stromzufuhr unterbrechen können.

Stellen Sie sicher, dass das Telefon mindestens 1 Meter entfernt von anderen elektrischen Produkten z. B. TV, Radio ist, um so Störungen zu vermeiden. Vermeiden Sie auch direkte Wärme und Sonnenlicht. Wir empfehlen Ihnen, das Telefon auf eine Tischdecke oder ähnlichem zu stellen, so wie Gummifüße eine Grundfläche markieren können.


## Mobilteil Reichweite

Das Telefon hat eine Reichweite von 30-50 Meter in Gebäuden und bis zu 300 Meter im Freien. Der Bereich wird reduziert, wenn keine Sichtverbindung zwischen Basis und Mobilteil besteht. Stellen Sie die Basisstation so hoch wie möglich auf, um für die beste Signalqualität zwischen Basis und Mobilteil zu sorgen. Das **▶▶▶▶** Symbol am oberen linken Rand des LCD-Displays blinkt und die Stärke der Balken verschwindet, um Sie zu warnen, wenn Sie sich ausserhalb der Reichweite der Basisstation befinden. Sie müssen näher an die Basisstation, da die Telefonleitung unterbrochen werden könnte und Sie damit das Mobilteil wieder in den standby Modus zurückbringen können.


## Einrichtung

---

Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose an der Basis. Stecken Sie den Adapter des Stromkabels in die Steckdose und schalten Sie das Angebot auf. (\*)

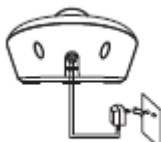


An die Wandsteckdose

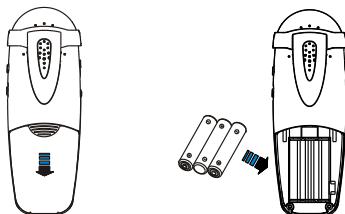

Legen Sie die Akkus in das Mobilteil. Das Mobilteil benötigt drei Nickel Metal Hydride (NiMH) AAA Akkus. Diese werden mit dem Telefon geliefert. Schieben Sie die Batterieabdeckung in Richtung des Pfeils. Überprüfen Sie die Polarität der Akkus beim Einlegen der Akkus in das Mobilteil. Passen Sie die Batterieabdeckung wieder auf die Rückseite des Mobilteils an, bis die Abdeckung einrastet. Platziere das Mobilteil auf die



# INSTALLATION (MOBILTEIL & BASIS)

Basis, ein kurzer Piep ist zu hören. Das Batteriesymbol  wird im Display angezeigt. Sobald das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display ein volles Batteriesymbol.

Das Telefon verfügt über eine automatische Ladekontrolle, um unnötige Kosten zu vermeiden. Bevor das Mobilteil benutzt werden kann, müssen die Akkus mindestens 15 Stunden auf der Basis aufgeladen werden.


(\*) Classified "hazardous voltage" according to EN60950 standard

(\*\*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.



## Batteriegebrauch

---

Das  Symbol wird kontinuierlich an der oberen rechten Ecke des LCD-Displays angezeigt. Das Symbol zeigt die Höhe der Batterieleistung an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto mehr Leistung steht zur Verfügung.




Wenn der Akku zu schwach ist um das Telefon zu bedienen, wird das Mobilteil automatisch ausschalten. Legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation um den Akku aufzuladen. Unter idealen Bedingungen, sollte der Akku des Mobilteils ca. 6 Stunden Sprechzeit oder 150 Stunden standby mit einer einzigen Ladung auskommen.

## Mobilteil Trageclip

---

Mit dem Mobilteil Trageclip können Sie das Mobilteil an Ihrem Gürtel oder an Ihrer Hemdtasche tragen. Wenn Sie den Clip abmachen möchten, gehen Sie mit einem Schraubenzieher an ein Ende des Arms und heben Sie den Clip an.

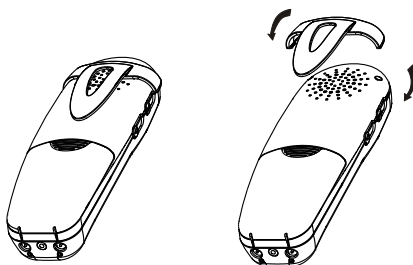

# INSTALLATION (BASIS)

## Einrichten

Schließen Sie das eine Ende des Spiralkabels an den Hörer an. Das andere Ende des Spiralkabel stecken Sie in die Buchse auf der linken Seite des AMPLIDECT™ COMBI355. Legen Sie das Mobilteil auf die Ladestation.

Bringen Sie das Netzkabel an die Buchse an der Rückseite des Telefons an, dann stecken Sie den Stecker in die Anschlussdose \*\*.

Bringen Sie das Netzteil an die Buchse an der Rückseite des Telefons an, das andere Ende stecken Sie in die Steckdose 13amp (\*). Bitte wählen Sie eine Steckdose in der Nähe Ihres Telefons, damit Sie bei Problemen den Netzstecker schnell abziehen können.

(\*) Classified "hazardous voltage" according to EN60950 standard

(\*\*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

## Wandmontage

Schieben Sie den Höraufhänger heraus und drehen sie seine Position (180 Grad). Schieben Sie es zurück an ihren Platz, so dass der Haken nach oben zeigt (siehe Abbildung 1). Dies verhindert das Herausfallen des Hörers aus der Gabel, wenn es an die Wand montiert ist.

Bringe zwei eigene Schrauben (nicht mitgeliefert) an die Wand an, in einem Abstand von 167,5 mm voneinander und in einer vertikale Linie. Platzieren Sie das Telefon auf die Schraubenköpfe und ziehen Sie es nach unten um es zu sichern (siehe Abbildung 2).

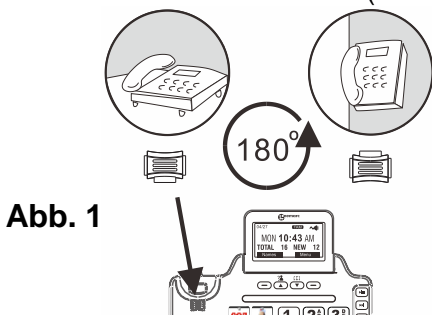


Abb. 1

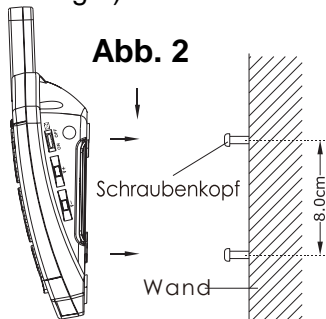




Abb. 2

# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN

## An/Aus Einstellungen

Wenn das Mobilteil auf dem Ladegerät steht, meldet es sich autom. an. Alternativ, drücken  für ungefähr 5 Sekunden. Das Telefon betritt den Einzeichnungsmodus in dem das Mobilteil nach einer registrierter Basis sucht.



Nach erfolgreicher Suche einer Basis wird das LCD Fenster die Zeit anzeigen (entweder selber einstellen – siehe Mobilteil Einstellungen – Datum & Zeit einstellen oder es stellt sich automatisch ein indem Sie einen Anruf erhalten und vorausgesetzt Ihr Anrufer ID ist aktiviert) und die Mobilteilnummer. Das Mobilteil ist jetzt im Stand-by Modus und kann benutzt werden.

Um das Mobilteil auszuschalten, erneut drücken  für ungefähr 5 Sekunden. Die LCD Anzeige schaltet sich aus.


## Alarm Einstellung


Sie können mit dem Hörer einen Alarm einstellen und die Einstellungen abstimmen .

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren


Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'**



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Drücke  (**linke Seite**) erneut und wähle **'ALARM'**

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'AN'** oder **'AUS'** Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Wählen Sie **'AN'** sie werden aufgefordert die Zeit einzugeben in SS:MM Format (24 Stunden Format). Geben Sie die Weckzeit über das numerische Tastenfeld ein.

Drücke  (**linke Seite**) um zur nächsten Ansicht zu gelangen.

Drücke  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'SCHLUMMERN AN'** oder **'SCHLUMMERN AUS'**

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden.

# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN



## Hinweise:


Drücken Sie eine beliebige Taste um den Alarm auszuschalten. Wenn Sie wählen 'SCHLUMMERN AN', wird der Alarm in regelmäßigen Abständen von 10 Minuten klingeln, bis Sie Schlummern oder Alarm ausschalten.



## Audio Einrichten

Die Lautstärke des Lautsprechers oder Hörers kann angepasst werden .



Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Drücke  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'AUDIO EINRICHTEN'

Press  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'LAUTSPRECHER LAUT.' oder 'HÖRER LAUT.'.

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle erforderliche Lautstärke. Es gibt 5 Lautstärkeeinstellungen



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

## Klingel Einrichten



### Klingeltöne

Es gibt eine Auswahl von 10 Mobilteil-Klingeltönen, um Sie über eingehende Anrufe zu informieren. Sie können verschiedene Töne auswählen, wenn der Anruf intern (aus anderen angemeldeten Mobilteile an derselben Basis) oder extern (aus dem Festnetz) ankommt.

Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen


Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle


# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN

## 'KLINGEL EINRICHTEN'



Drücke  (linke Seite) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'INT KLINGEL/EXT KLINGEL'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Drücke  (linke Seite) und wähle '**MELODIE**'

Drücke  (**linke Seite**) und wähle



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle gewünschte Melodie. Wenn Sie durchblättern, demonstriert das Telefon den ausgewählten Ton / Melodie

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern



## Klingellautstärke

Es gibt eine Auswahl von fünf Mobilteil-Klingellautstärken. Der Rufton kann auch ausgeschaltet werden.

Drücke '**MENÜ**' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'KLINGEL EINRICHTEN'



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'INT KLINGEL/EXT KLINGEL'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'LAUTSTÄRKE'

Drücke  (**linke Seite**) und wähle

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle gewünschte Klingellautstärke. Wenn Sie durchblättern, demonstriert das Telefon die gewählte Lautstärke

# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

## Tastaturton Einrichten



Ein Grundton wird jedes Mal zu hören sein, wenn Sie eine Taste auf dem Mobilteil drücken. Dies kann abgeschaltet werden.

**Hinweis:** Wird eine falsche Taste gedrückt, wird weiterhin ein Warnton abgegeben.


Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'**



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'TON EINRICHTEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Drücke  (**linke Seite**) wieder und wähle **'TASTEN TON'**



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'AN'** oder **'AUS'**

Drücke  (**linke Seite**) um das Speichern zu bestätigen. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sek.



## Abgrenzungsalarm

Ein Signalton wird jedes Mal zu hören sein, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet. Dieser Signalton kann ausgeschaltet werden.

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'**



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle



# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN



'TON EINRICHTEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'ABGRENZUNGSALARM'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'AN' oder 'AUS'

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden.



## Spracheinstellungen

Das Mobilteil verfügt über acht Sprachen. Sie können die Sprache auswählen, welche im Menü angezeigt werden soll.



Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'SPRACHE'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle die gewünschte Sprache. Jede Sprache wird in seiner eigenen Muttersprache angezeigt.



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden.

# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN



## Mobilteil benennen

Das Mobilteil hat einen Namen - "MT n"(n ist entweder 1,2,3,4 oder 5). Diese Zahl gibt an, dass das Mobilteil als das n-te Mobilteil an der Basis registriert ist. MT 1 ist als das 1. Mobilteil an der Basis registriert. Der Name des Mobilteils wird im standby Modus angezeigt. Falls gewünscht, kann es verändert werden.


Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT BENENNEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Geben Sie die neue Benennung des MT (bis zu 12 Zeichen) über das numerische Tastenfeld ein (siehe Telefonbuch – neuer Eintrag hinzufügen). Drücke  (**rechte Seite**) um vorheriges Zeichen zu löschen, wenn es nicht richtig sein sollte.

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in StandBy zurückzukehren oder warte 30 Sekunden.



## Automatische Rufannahme

Bei der automatische Rufannahme können Sie einen Anruf durch einfaches Abnehmen des Hörers von der Basis, ohne Drücken einer beliebigen Taste, annehmen.

Drücken **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle





# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN

'AUTOM. RUFANNAHME'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'AN' oder 'AUS'.

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden.



## Kontrast Einrichten

Der Hintergrundkontrast kann dem Text gegenüber vergrößert oder verkleinert werden



Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'LCD KONTRAST'

Drücke  (**linke Seite**) zum bestätigen

Benutze  und  um durch die 16 Kontrastebenen zur blättern

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden.



# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN

## Datum & Zeit



### Datum & Zeit Format

Die Datumsformatanzeige auf dem Mobilteil kann verändert werden. Das Format kann entweder TT // MM oder MM / TT sein. Das Format der Zeit kann entweder 12 Stunden oder 24 Stunden sein.


Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'DATUM & ZEIT'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Drücke  (**linke Seite**) wieder um auszuwählen 'DATUMS FORMAT' oder 'ZEIT FORMAT'



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'TT-MM' oder 'MM-TT' '12-St.' oder '24-St.'



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden.

### Datum & Zeit Einstellung

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'DATUM & ZEIT'



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'DATUM EINR.' oder 'ZEIT EINR.'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Geben Sie das aktuelle Datum oder die Uhrzeit über das numerische Tastenfeld ein



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden

**Hinweis:** Wenn Sie über einen Anrufer-ID-Dienst verfügen, wird die Zeit automatisch eingestellt, wenn Sie einen Anruf erhalten.



## Basis auswählen

Sie können eine Basis auf dem bereits das Mobilteil angemeldet ist auswählen. Sie können nur Basen auswählen, die bereits auf dem Mobilteil angemeldet sind.



Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BASIS AUSWÄHLEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  blättern Sie durch die Liste der registrierten Basen um die erforderliche Basis auszuwählen

Drücke  (**linke Seite**) um zu bestätigen



'WÄHLE BS n' wird angezeigt (n ist die Anzahl der angemeldeten Basen). Man hört einen Bestätigungston

# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN

## Mobilteil zurücksetzen

Sie können die Einstellungen des Mobilteils auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'MT ZURÜCKSETZEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Sie werden aufgefordert, den PIN-Code (Standard: 0000) einzugeb.



Drücke  (**linke Seite**) um zurückzusetzen

Wenn der PIN-Code akzeptiert wird, werden alle Einstellungen des Mobilteils auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie kommen automatisch in den standby Modus zurück.

## Verstärkung Einstellung

Der Normalbereich der Lautstärkereger ist 0-15dB. Wenn die Verstärkung eingeschaltet ist, wird die Verstärkung auf 15-30dB erhöht.

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'MT (Mobilteil) EINSTELLUNGEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'VERSTÄRKUNG'**



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'AN'** oder **'AUS'** oder drücke  um in standby zurückzukehren

# MOBILTEIL EINSTELLUNGEN

oder warte 30 Sekunden.

## Tastensperre

Wenn diese Funktion aktiviert ist, alle Tasten außer  sind gesperrt und ausser Funktion. Sie können es benutzen  für die Beantwortung von eingehenden oder Interngesprächen. Wenn Sie das Gespräch beenden und den Hörer auflegen, kehrt das Telefon in den Sperr-Modus zurück. Diese Sperre ist nützlich, um versehentlich Tasten zu drücken.

Sperre einschalten: Drücke  bis das  Symbol und **'MT (Mobilteil) GESPERRT'** auf dem LCD Bildschirm erscheint



Sperre ausschalten: Drücke  bis das  Symbol auf dem LCD Bildschirm verschwindet

# GRUNDEINSTELLUNGEN VOM MT


## Mobilteil abmelden

Sie können ein Mobilteil von einer Basis-Registrierung entfernen

Drücke **'MENU'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'BS EINSTELLUNGEN'**



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen


Drücke  (**linke Seite**) wieder um auszuwählen **ENTFERNE MT'**

Sie werden aufgefordert, den PIN-Code (Standard: 0000) einzugeben. **'PIN ?'**

Geben Sie die PIN über den Ziffernblock ein

Drücke  (**linke seite**) um zu bestätigen (**OK**)

Benutze  und  blättern Sie durch die Liste der registrierten Mobilteile um die erforderliche Basis auszuwählen

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen (wenn das momentane Mobilteil oder ein nicht existierendes Mobilteil ausgewählt wurde, ist ein Warnton ist zu hören)


Das ausgewählte Mobilteil wird abgemeldet

## Einstellung Wahlverfahren



In UK alle Fernsprechämter verwenden jetzt Tonwahl. Wenn Ihr Telefon nicht hinauswählen kann, ist wahrscheinlich ein älterer privater Schalter-Board (PBX) eingesetzt. In diesem Fall muss die Ton / Impuls Einstellung zum Impuls geändert werden.

Drücke **'MENU'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'BS EINSTELLUNGEN'**



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

# GRUNDEINSTELLUNGEN VOM MT

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'Wahl MODUS'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle entweder 'TON' oder 'IMPULS'

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden



## Flash Time Einstellung

Sie können die Flashzeiteinstellung anpassen. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung. Ihr Telefon arbeitet mit einer Flash-Zeit des Vereinigten Königreiches (R = 100ms).



Drücke **'MENU'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BS EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'FLASH TIME'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle entweder 'FLASH-1' or 'FLASH-2'



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden


## PIN ändern



Die PIN ist auf '0000' voreingestellt. Dies kann geändert werden - dies sollte vertraulich behandelt werden.

Drücke **'MENU'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

# GRUNDEINSTELLUNGEN VOM MT


Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BS EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'ÄNDERN PIN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Sie werden aufgefordert, den alten PIN-Code (Standard: 0000) einzugeben. 'PIN ?'. Geben Sie die PIN über das numerische Tastatfeld ein. Drücke 'NÄCHSTE' Weichtaste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Wenn der alte PIN-Code akzeptiert wird, werden Sie aufgefordert, einen neuen PIN-Code einzugeben. 'NEUER PIN'

Geben Sie den neuen PIN-Code über das numerische Tastenfeld ein und drücken Sie  (**linke Seite**) um zum nächsten Bildschirm zu gelangen



Sie werden aufgefordert, den neuen PIN-Code zu bestätigen, 'WIEDERHOLEN'. Neuen PIN-Code wieder eingeben.


Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern. Oder drücke  um in standby zurückzukehren oder warte 30 Sekunden



## Basis Standardeinstellung


Sie können die Basis-Einstell. auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BS EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BS ZURÜCKSETZEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Sie werden aufgefordert, den PIN-Code (Standard: 0000) einzugeben.

Drücke  (**linke Seite**) um zurückzusetzen

Wenn der PIN-Code akzeptiert wird, werden alle Grundeinstellungen auf





# BASIS EINSTELLUNGEN

die Werkseinstellung zurückgesetzt. Sie kehren automatisch in den standby Modus zurück.


## Mobilteil abmelden

Sie können ein Mobilteil von einer Basis-Registrierung abmelden

Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BS EINSTELLUNGEN'



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen


Drücke  (**linke Seite**) wieder um auszuwählen  
'ABMELDEN MT (Mobilteil)'

Sie werden aufgefordert, den PIN-Code (Standard: 0000) einzugeben. 'PIN ?'

Geben Sie die PIN über die Zifferntastatur ein

Drücke  (**linke Seite**) zum bestätigen (OK)

Benutze  und  um durch die Liste der registrierten Mobilteile zu blättern und das gewünschte Mobilteil auszuwählen

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen (wenn das aktuelle Mobilteil oder ein nicht existierender Hörer ausgewählt, wird ein Warnton zu hören sein)



Das gewählte Mobilteil wird abgemeldet

# BASIS EINSTELLUNGEN



## Audio Einrichten

Die Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers kann angepasst werden.



Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'BS EINSTELLUNGEN'**


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'AUDIO EINRICHTEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'LAUTSP. LAUTST.'** oder **'HÖRER LAUTST.'**

Benutze  und  um durch das Menü zur gewünschten Lautstärke zu blättern. Es gibt 5 Lautstärke-Einstellungen.

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern



# BASIS EINSTELLUNGEN

## Klingel Einrichten



### Klingeltöne

Es gibt eine Auswahl von 5 Basis Klingeltönen, um Sie über eingehende Anrufe zu informieren. Es können verschiedene Töne ausgewählt werden um Sie zu benachrichtigen, ist der Anruf intern (aus anderen angemeldeten Mobilteilen an derselben Basis) oder extern (aus dem Festnetz).

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'BS EINSTELLUNGEN'**




Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'KLINGEL EINRICHTEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'INT KLINGEL/EXT KLINGEL'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen **'MELODIE'**  
Benutze  und  um durch das Menü zur gewünschten Melodie zu blättern. Wenn Sie durchblättern, demonstriert das Telefon den ausgewählten Ton / Melodie.

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

### Klingellautstärke



Es gibt eine Auswahl von fünf Basisklingellautstärken. Der Rufton kann auch ganz ausgeschaltet werden.

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'BS EINSTELLUNGEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



# BASIS EINSTELLUNGEN



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'KLINGEL EINRICHTEN'


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'INT KLINGEL/EXT KLINGEL'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'LAUTSTÄRKE'

Benutze  und  um durch das Menü zur gewünschten Klingellautstärke zu blättern. Wenn Sie blättern, demonstriert das Telefon die gewählte Lautstärke.



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

## Tastaturton Einrichten



Ein Grundton ist zu hören, jedes mal wenn Sie eine Taste an der Basis drücken. Dies kann ausgeschaltet werden.

**Hinweis:** Warntöne werden weiterhin ausgegeben, sollte eine falsche Taste gedrückt werden.



Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BS EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'TASTEN TON'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'AN' oder 'AUS'



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

# BASIS EINSTELLUNGEN



## Spracheinstellungen

Die Basis unterstützt drei Sprachen. Sie können die benötigte Sprache durch die Menü-Optionen anzeigen lassen.



Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'BS EINSTELLUNGEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'SPRACHE'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Benutze  und  um durch das Menü zur gewünschten Sprache zu blättern. Jede Sprache wird in seiner eigenen Muttersprache übersetzt angezeigt.

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern



## Kontrast Einrichten


Der Hintergrundkontrast kann im Vergleich zum Text erhöht oder verringert werden.



Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'BS EINSTELLUNGEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'LCD KONTRAST'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch die 16 verfügbaren Kontraststufen zu blättern

# BASIS EINSTELLUNGEN



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

## Datum und Zeit



### Datum & Zeit Format

Das an der Basis angezeigte Datumsformat kann verändert werden. Das Format ist entweder TT / MM oder MM / TT. Das Zeitformat ist entweder 12 Stunden oder 24 Stunden.


Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BS EINSTELLUNGEN'



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'DATUM & ZEIT'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Drücke  (**linke Seite**) wieder um auszuwählen  
'DATUMS FORMAT' oder 'ZEIT FORMAT'



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'TT-MM' oder 'MM-TT' '12-Std.' oder '24-Std.'

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

### Datum & Zeit Einstellung

Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BS EINSTELLUNGEN'



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen


Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle

# BASIS EINSTELLUNGEN


'DATUM & ZEIT'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'DATUM EINRICHTEN' oder 'ZEIT EINRICHTEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Geben Sie das aktuelle Datum oder die Uhrzeit über das numerische Tastenfeld ein



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern


**Hinweis:** Verfügten Sie über eine Anrufer ID, wird die Zeit automatisch eingestellt sobald Sie einen Anruf erhalten.



## Einstellung Wahlverfahren

In UK alle Fernsprechämter verwenden jetzt Tonwahl. Wenn Ihr Telefon nicht hinauswählen kann, ist wahrscheinlich ein älterer privater Schalter-Board (PBX) eingesetzt. In diesem Fall muss die Ton / Impuls Einstellung zum Impuls geändert werden.


Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren


Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'BS EINSTELLUNGEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'WAHLVERFAHREN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle entweder 'TON' oder 'IMPULS'



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

# BASIS EINSTELLUNGEN



## Flash Time Einstellung


Sie können die Flashzeiteinstellung anpassen. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung. Ihr Telefon arbeitet mit einer Flash-Zeit des Vereinigten Königreiches (R = 100ms).



Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'BS EINSTELLUNGEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'FLASH TIME'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle entweder **'FLASH-1'** oder **'FLASH-2'**

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern



## PIN ändern

Die PIN ist auf '0000' voreingestellt. Dies kann geändert werden - dies sollte vertraulich behandelt werden.

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'BS EINSTELLUNGEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'PIN ÄNDERN'**


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Sie werden aufgefordert, den alten PIN-Code (Standard: 0000) einzugeben. **'PIN ?'**. Geben Sie die PIN über das numerische Tastafeld ein. Drücke **'NÄCHSTE'** Weichtaste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Wenn der alte PIN-Code akzeptiert wird,



# BASIS EINSTELLUNGEN

werden Sie aufgefordert, einen neuen PIN-Code einzugeben. '**NEUER PIN**'

Geben Sie den neuen PIN-Code über das numerische Tastenfeld ein und drücken Sie  (**linke Seite**) um zum nächsten Bildschirm zu gelangen

Sie werden aufgefordert, den neuen PIN-Code zu bestätigen, '**WIEDERHOLEN**'. Neuen PIN-Code wieder eingeben...

Drücke  (**left side**) to save.

## Basis Standardeinstellung

Sie können die Basis-Einstell. auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Drücke '**MENÜ**' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle '**BS EINSTELLUNGEN**'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle '**BS ZURÜCKSETZEN**'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Sie werden aufgefordert, den PIN-Code (Standard: 0000) einzugeben.

Drücke  (**linke Seite**) um zurückzusetzen


Wenn der PIN-Code akzeptiert wird, werden alle Grundeinstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Sie kehren automatisch in den standby Modus zurück.

# BENUTZUNG DES TELEFONS (MT)

## Anrufen


Mobilteil abnehmen.  
Drücke .  wird am LCD angezeigt


Wenn Sie das Freizeichen hören, wählen Sie die Nummer auf dem Tastenfeld.

Um das Gespräch zu beenden drücke  oder das Mobilteil in die Basis zurücklegen


## Vorwählen


Hörer abheben. Wählen Sie die Nummer auf dem Tastenfeld (bis zu 32 Stellen).

Drücke , die Nummer wird automatisch gewählt

Um das Gespräch zu beenden drücke  oder lege das Mobilteil in die Basis zurück

**Hinweis:** Wenn Sie eine falsche Eingabe während der Vorwahl der Telefonnummer machen:

Drücke  (**rechte Seite**) um zu 'LÖSCHEN' der letzten Eingabe und dann geben Sie die richtige Nummer ein.

Drücke  (**rechte Seite**) für länger als eine Sekunde 'LÖSCHEN' aller Eingaben und zurück in den Standby-Modus.



## Anruf erhalten

Bei einem eingehenden Anruf wird das Telefon klingeln. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann (durch die Befähigung einer Anrufer-ID), wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Wenn diese Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der zugehörige Name angezeigt.

Drücke  um den Anruf anzunehmen oder wenn die autom. Rufannahme aktiviert ist, MT aus der Basis nehmen

Um das Gespr. zu beenden drücke  oder lege das MT (Mobilteil) in die Basis zurück

Gesprächsdauer wird immer angezeigt, sobald Sie auflegen.


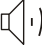
**Hinweis:** Sie können die Rufonlautstärke ändern, während das Telefon klingelt. Einfach betätigen  und  um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.

# BENUTZUNG DES TELEFONS (MT)



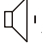
## Freisprechen

---

Sie können den Freispr. entweder vor oder während des Gesprächs einschalten. Während diesem Modus, brauchen sie das Mobilteil nicht zum halten. Sie hören Ihren Anrufer über den Lautspr. und das Mikrofon nimmt Ihre Stimme auf.

Vor dem Anruf, drücke  zweimal um den Freisprecher einzuschalten. Das  Symbol wird am LCD angezeigt.

Drücke  während des Gesprächs und der Freisprecher geht an.

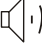Das  Symbol wird am LCD angezeigt. Drücke  wieder während des Gespr. und der Freisprecher geht aus. Das  Symbol verschwindet vom LCD.

**Hinweis:** Um die Frei.spr.lautst. anzupassen benutzen Sie die Audioeinrichtung bei den Mobilteil-Einstellungen.

## Stummfunktion


---

Wenn Sie möchten, können Sie im Zimmer mit jemanden sprechen ohne das Ihr Anrufer es mithören kann.

Es ist weiterhin möglich den Anrufer zu hören, aber er kann Sie nicht hören während der Stummfunktion.



Während eines Gesprächs, drücke  (**rechte Seite**) für 'STUMM'

Die LCD zeigt 'ANRUF STUMM' was bedeutet, dass Ihre Stimme unterdrückt ist, und der Anrufer kann Sie nicht hören

Drücke  (**rechte Seite**) wieder um das Gespräch wieder aufzunehmen. 'ANRUF STUMM' wird vom LCD Bildschirm verschwinden

## Annahmelautstärke

---

Während eines Gesprächs, die  und  Tasten können die Lautstärke der Hörmuschel anpassen. Die Lautstärke kann von Stufe 1 bis 5 eingestellt werden. Die gewählte Lautstärke wird im Display angezeigt. Das Aufnahmevolumen beträgt 0 dB bis 15 dB. Wenn Sie die Verstärkungstaste auf der rechten Seite des Mobilteils drücken, oder wenn Sie die Einstellung der Verstärkung im Mobilteil auf ein eingestellt haben, erhöht sich die Lautstärke von 15-30dB.


Es gibt auch einen Toneinstellknopf auf der rechten Seite des Mobilteils.

# BENUTZUNG DES TELEFONS (MT)

## Letzte Nummer Wiederwahl

Um die letzte Nummer wieder zu wählen:

Das Mobilteil nehmen.


Drücke  im standby Modus



Drücke  um die Nummer zu wählen

## Wiederwahl kürzlicher Nummern

Sie können einen Rückruf einer der 10 zuletzt gewählten Nummern wie folgt vornehmen:

Das Mobilteil nehmen.

Drücke  im standby Modus

Benutze  und  und blättern Sie durch die gewählten Nummern, bis Sie die Nummer finden die Sie anrufen möchten

Drücke  um die Nummer zu wählen

### Hinweis :


Wenn keine Nummern gefunden werden, **LEER** wird angezeigt



Wenn der Wahlwiederholungsspeicher voll ist, d.h. 10 Nummern sind gespeichert, wird jedes Mal, wenn eine neue Nummer gewählt wird, die älteste gespeicherte Nummer automatisch gelöscht und der Wahlwiederholungsspeicher ist aktualisiert.

# BENUTZUNG DES TELEFONS (MT)

## Hinzufügen kürzlicher Nummern ins Telefonbuch

Das Mobilteil nehmen.

Drücke  im standby Modus

Benutze  und  und blättern Sie durch die gewählten Nummern, bis Sie die Nummer finden die Sie im Telefonbuch speichern möchten

Drücke  (**linke Seite**) um zu bestätigen



Drücke  (**linke Seite**) erneut und wähle 'HINZUFÜGEN ZUM TB'

Der Bildschirm zeigt an 'NAME?' Geben Sie den gewünschten Namen über den Ziffernblock (siehe Buchstabenkarte weiter unten)

Drücke  (linke Seite) und wähle 'WEITER'

Das Display zeigt die gewählte Nummer der zuletzt gewählten Liste

Drücke  (linke Seite) und wähle 'WEITER'

Benutze  und  und blättern Sie durch das Melodiemenü um den gewünschten Klingelton auszuwählen. Wenn Sie durchblättern, demo. das Telefon die ausgewählte Melodie. Wenn Sie eine VIP-Nr. einstellen möchten, sollten Sie einen speziellen Klingelton auswählen. Der Klingelton sollte anders sein als der den Sie sonst benutzen. Sie können bis zu 9 VIP-Klingeltöne 9 Zahlen zugeordnet


Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern



# BENUTZUNG DES TELEFONS (MT)

## Löschen kürzlicher Nummern


### Löschen einer bestimmten Nr. im Wiederwahlspeicher

Das Mobilteil nehmen


Drücke  im standby Modus

Benutze  und  und blättern Sie durch die gewählten Nummern, bis Sie die Nummer finden die Sie löschen möchten

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen


Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'LÖSCHEN'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Sie werden aufgefordert zu 'BESTÄTIGEN ?'. Drücke  (**linke Seite**) wieder um zu 'LÖSCHEN'

### Um alle Nummern im Wiederwahlspeicher zu löschen


Das Mobilteil nehmen.

Drücke  im standby Modus

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'ALLES LÖSCHEN'


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Sie werden aufgefordert um zu 'BESTÄTIGEN ?'. Drücke  (**linke Seite**) wieder um 'ALLES LÖSCHEN'

# BENUTZUNG DES TELEFONS (MT)

## Flash Signal

---

Die  (**linke Seite**) Taste kann auch während eines Gesprächs mit speziellen Diensten wie Anklopfen verwendet werden (falls von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt) oder Weiterleitungen von externen Anrufen an eine andere Nebenstelle innerhalb einer privaten Vermittlung. Der LCD-Bildschirm zeigt 'R'

## Hörgerätbenutzung


---

Dieses Telefon ist mit Hörgeräten kompatibel. Wählen Sie den T-Modus auf Ihrem Hörgerät, um diese Funktion zu aktivieren.


## Paging das Mobilteil

---

Wenn Sie den Hörer suchen, folgen Sie einfach den nachstehenden Anweisungen:

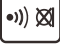Drücke , befindet sich auf der Unterseite der Basis, für weniger als 5 Sekunden

Alle angemeldeten Mobilteile werden funken und werden für etwa 60 Sekunden klingeln

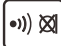Drücken Sie eine beliebige Taste der angemeldeten Mobilteile oder drücken wieder  an der Basis um das Paging zu stoppen

## Anruf-Timer

---

Ihr Mobilteil zeichnet automatisch die Zeit jedes auswärtigen Anrufes auf. Die Zeit wird während des Gespräches und für ein paar Sekunden nach Beendigung des Gesprächs angezeigt.

# BENUTZUNG DES TELEFONS (BS)

## Anrufen

Hörer abnehmen

Wenn Sie das Freizeichen hören, wählen Sie die Nummer auf dem Tastenfeld.


Zum Beenden des Gesprächs einfach den Hörer in die Gabel legen.

## Vorwählen

Sie können die gewünschte Rufnummer im Standby-Modus eingeben und Korrekturen vor der Wahl vornehmen. Befolgen Sie diese Schritte:

Geben Sie eine Telefonnummer ein (bis zu 32 Ziffern). Überprüfe es.

Wenn Sie einen Fehler bei der Eingabe einer Nummer machen, drücken Sie die '**LÖSCHEN**' Weichtaste, um es zu bearbeiten.

Wenn die Nummer richtig erscheint, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die  Taste.

## Anruf erhalten


Wenn ein eingehender Anruf empfangen wird, klingelt das Telefon und die eingehende Anruf-LED leuchtet auf.


Heben Sie den Hörer ab und fangen Sie an zu sprechen

Zum Beenden des Gesprächs einfach den Hörer auf die Gabel legen


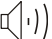

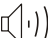
## Freisprechen


### Anruf erhalten – Freisprecher

Drücke  um frei zu sprechen

Um das Gespräch zu beenden drücke 

### Anruf tätigen - Freisprecher

Drücke die  Taste um das Freizeichen zu bekommen und dann wähle die Nummer auf der Tastatur. Das  Symbol erscheint auf dem LCD. Um das Gespräch zu beenden, wieder  drücken. Das  Symbol verschwindet.

Um den Freisprecher während des Gespräches zu aktivieren, drücke die  Taste und lege den Hörer wieder in die Gabel zu selben Zeit.





# BENUTZUNG DES TELEFONS (BS)

Um die Freisprechfunktion während eines Gespräches zu deaktivieren, heben Sie einfach den Hörer ab.

**Hinweis:** Im Freisprechmodus kann nur eine Person gleichzeitig sprechen. Die Umschaltung zwischen Lautsprecher und Mikrofon erfolgt automatisch. Dies ist abhängig von der Lautstärke des eingehenden Anrufs und des jeweiligen Mikrophons. Es ist daher wichtig, dass es keine lauten Geräusche, wie z.B. Musik, in unmittelbarer Nähe des Telefons gibt, da dies die Freisprechfunktion stören könnte.

## Lautsprecherlautstärke Einstellung

Im Freisprechermodus können Sie die Sprachlautstärke einstellen, indem Sie die Lautstärkekontrolle benutzen  + oder  - die sich an dem Basisgerät befindet.


## Stummfunktion

Wenn Sie möchten, können Sie privat mit jemandem im Zimmer sprechen ohne das Ihr Anrufer mithören kann.



Sie können weiterhin den Anrufer hören, aber er kann Sie nicht hören während die Stummschaltung in Betrieb ist.

Während eines Gespräches drücke 

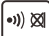Die LCD zeigt 'ANRUF STUMM' was bedeutet, dass Ihre Stimme für das Gespräch stumm geschaltet ist und der Anrufer kann Sie nicht hören

Drücke  erneut um das Gespräch wieder aufzunehmen. 'ANRUF STUMM' verschwindet vom LCD.

## Annahmelautstärke

Während eines Gespräches, die  und  Tasten können die Hörerlautstärke verändern. Die Lautstärke kann von Stufe 1 bis 5 eingestellt werden. Die gewählte Lautstärke wird im Display angezeigt. Das Aufnahmevolumen beträgt 0 dB bis 15 dB.

## Letzte Nummer Wiederwahl


Hörer abheben oder drücke  für Freisprechgebrauch



Drücke  um die letzte Nummer wiederzuwählen

# BENUTZUNG DES TELEFONS (BS)

Drücke 'OK' für die Wiederwahl

## Wiederwahl kürzlicher Nummern

Drücke  während dem standby Modus

Benutze  und  und blättern Sie durch die gewählten Nummern, bis Sie die Nummer finden die Sie anrufen möchten

Hörer abnehmen oder drücke  für Freisprechgebrauch

## Hinzufügen kürzlicher Nummern ins Telefonbuch

Wie beim Mobilteil

## Löschen kürzlicher Nummern


### So löschen Sie bestimmte Nummern in der Wahlwiederholung

Wie beim Mobilteil

### So löschen Sie alle Nummern in der Wahlwiederholung

Wie beim Mobilteil

## Flash Signal

Die  (**linke Seite**) Taste kann auch während eines Gesprächs mit speziellen Diensten wie Anklopfen verwendet werden (falls von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt) oder Weiterleitung von externen Anrufen an eine andere Nebenstelle innerhalb einer privaten Vermittlung. Der LCD-Bildschirm zeigt 'R'.

## Hörgerätbenutzung

Dieses Telefon ist mit Hörgeräten kompatibel. Wählen Sie die T-Modus auf Ihrem Hörgerät, um diese Funktion zu aktivieren.

## Anruf Timer


Die Dauer der einzelnen externen Anrufe wird aufgezeichnet. Die Zeit wird während des Gesprächs und für ein paar Sekunden nachdem der Anruf beendet ist angezeigt.

# SONDERZUBEHÖR (MT)

## **Kopfhörer benutzen**

---

Ihr Mobilteil ist mit einem Kopfhörer-Buchse ausgestattet.

Die Kopfhörer-Buchse ermöglicht Ihnen zu Hören und zu Sprechen über Ihren Freihand-Kopfhörer. Schließen Sie den Kopfhörer an der Seite des Mobilteils in den 2,5-mm Steckanschluss an. Drücke  um ein Freizeichen zu bekommen.

# ANRUFER ID

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie über einen Anrufer-ID-Dienst Ihres Netzbetreibers verfügen.

Anrufer ID heißt, Sie können sehen, wer auf Ihrer Mobilteil-Anzeige anruft (vorausgesetzt, die Nummer ist nicht unterdrückt, nicht verfügbar oder es ist ein internationales Gespräch).




Der Anzeige zeigt **'UNTERDRÜCKT PRIVAT'** für eine unterdrückte Nummer.


Die Anzeige zeigt **'AUSSERHALB DES BEREICHS'** wenn ein Anruf aus einem Bereich kommt wo die Tel.gesellschaft keine Anrufer ID oder keinen Nummernservice anbietet. Ob Sie einen Anruf annehmen oder nicht, die Anruferdetails sind im Anrufer ID Buch gespeichert. Dieses Buch speichert die letzten 40 eingehenden Anrufe.

Jeder Eintrag in dem Buch ist mit einem ↑ gekennzeichnet ob der Anruf überprüft wurde ↓ oder nicht.

Dieses ↓ Symbol wird gezeigt wenn Sie einen Anruf oder mehrere verpasst haben. Wenn das Anrufer ID Buch voll ist, blinkt das Symbol ↓.




## Ansehen des Anrufer ID Buches

Drücke <b>'MENÜ'</b> Weichtaste um das Menü zu aktivieren
Drücke  ( <b>linke Seite</b> ) und wähle <b>'CID BUCH'</b>
Die Liste der Nummern im Anrufer-ID-Buch wird angezeigt
Benutze  und  um durch die Liste zu blättern



Alternativ, können Sie das Buch aufrufen indem Sie diese Taste  im standby Modus drücken.

**Hinweis:** Wenn keine Anrufer ID Nummer im Buch vorhanden ist, wird **'LEER'** angezeigt.

## Wähle eine Nummer aus dem Anrufer ID Buch


Drücke  im standby Modus
Eine Liste von Nummern im Anrufer ID Buch wird angezeigt
Benutze  und  um durch die Liste zu blättern und um die erforderliche Nummer zu finden

# ANRUFER ID


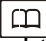
**MOBILTEIL:** Drücken , die Nummer wird automatisch gewählt  
**Basis:** Basishörer abheben oder  drücken

## Hinzufügen einer Nummer vom Anrufer ID Buch ins Telefonbuch

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren


Drücke  (linke Seite) und wähle **'CID Buch'**


Die Liste der Nummern im Anrufer-ID-Buch wird angezeigt


Benutze  und  um durch die Liste zu blättern und um den erwünschten Telefonbucheintrag zu finden


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen



Drücke  (linke Seite) und wähle **'HINZUF. ZUM TB'**

Der Zeiger wird an der rechten des Namens aufblinken. Namen modifizieren mittels  (**rechte Seite**) um von der bisherigen Funktion in die neue Funktion überzugehen

Drücke  (linke Seite) und wähle **'WEITER'**

Der Zeiger wird an der rechten des Namens aufblinken. Namen modifizieren mittels  (**rechte Seite**) um von der bisherigen Stelle in die neue Stelle überzugehen

Drücke  (linke Seite) und wähle **'WEITER'**


Benutze  und  um durch das Melodiemenü zu blättern um einen gewünschten Klingelton auszuwählen. Wenn Sie blättern, demonstriert das Telefon die Melodien. Wenn Sie eine VIP Nummer einrichten möchten, sollten Sie einen speziellen Klingelton auswählen. Der Klingelton sollte anders sein wie die bisherigen. Sie können 9 VIP Klingeltöne mit 9 Nummern verknüpfen.



Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

# ANRUFER ID



## Lösche eine Nummer aus dem Anrufer ID Buch

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren


Drücke  (linke Seite) und wähle **'CID BUCH'**

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'LÖSCHE'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen


Benutze  und  um durch die Liste zu blättern und um den erforderlichen Telefonbucheintrag zu ändern



Drücke  (linke Seite) um zu **'LÖSCHEN'**

Sie werden aufgefordert zu **'BESTÄTIGEN ?'**. Drücke  (**linke Seite**) erneut um zu **'LÖSCHEN'**

## Lösche alle Nummern aus dem Anrufer ID Buch

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Drücke  (linke Seite) und wähle **'CID BUCH'**

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'ALLES LÖSCHEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Sie werden aufgefordert um zu **'BESTÄTIGEN ?'**. Drücke  (**linke Seite**) erneut um **'ALLES LÖSCHEN'**

# TELEFONBUCH

Telefonnummern können im Telefonbuch gespeichert werden. Es ermöglicht Ihnen häufig benutzte Nummern zu speichern, damit Sie einfach einen Anruf tätigen können ohne sich an die Nummer zu erinnern und ohne Eingabe der Nummern.


Das Telefonbuch kann 50 Einträge enthalten. Jede Rufnummer kann bis zu 20 Ziffern und der Namen bis zu 12 Zeichen umfassen.

## Telefonbucheintrag erstellen


Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Drücke  (**linke Seite**) erneut und wähle **'NEU'**


Die Anzeige zeigt **'NAME?'** Geben Sie den gewünschten Namen über den Ziffernblock ein (s. Buchstabendiagramm unten). (Bis zu 12 Zeichen)

Drücke  (linke Seite) und wähle **'WEITER'**

Die Anzeige zeigt **'NUMMER?'** Geben Sie die Rufnummer über das numerische Tastenfeld ein (bis zu 20 Zeichen)


Benutze  und  blättern Sie durch das Melodiemenu um den gewünschten Klingelton auszuwählen. Wenn Sie durchblättern, demonstriert das Telefon die ausgewählte Melodie. Wenn Sie eine VIP-Nummer einstellen möchten, sollten Sie einen speziellen Klingelton auswählen. Der Klingelton sollte anders sein wie die bisherigen. Sie können 9 VIP Klingeltöne mit 9 Nummern verknüpfen.

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

**Hinweis:** Drücke  (**rechte Seite**) **'LÖSCHE'** um das letzte Zeichen zu löschen und dann geben Sie die richtige Nummer ein.

### Pause einbauen

Einfügen einer Pause ermöglicht eine Verzögerung von 3 Sekunden. Dies ist bei einigen Telefonanlagen erforderlich.


Zum Einfügen einer Wahlpause zwischen den Ziffern beim Speichern von Nummern, drücke  bis P an der Anzeige erscheint.

# TELEFONBUCH



## Buchstabendiagramm

Taste	Zeichenreihenfolge								
0	(spc)	0	?	&	/	.	,	!	
1	1	@	_	+	-	"	(	)	%
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9


## Zeige Telefonbucheinträge

Drücke  im standby Modus



Die Liste der Namen im Telefonbuch werden angezeigt



Benutze  und  um durch die Liste zu blättern und um den erforderlichen Namen zu finden


## Telefonbucheintrag wählen

Drücke  im standby Modus

Die Liste der Namen im Telefonbuch werden angezeigt

Benutze  und  um durch die Liste zu blättern und um den erforderlichen Namen zu finden

**MOBILTEIL:** Drücke die 'WAHL' Weichtaste oder drücke , die Nummer wird automatisch gewählt. Drücke  um über den Lautsprecher zu sprechen

**BASIS:** Drücke die 'WAHL' Weichtaste oder drücke , die Nummer wird automatisch gewählt. Den Hörer abnehmen, wenn Sie über den Hörer von der Basis sprechen wollen.



# TELEFONBUCH

## Telefonbucheintrag verändern



Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'PHONEBOOK'**


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Drücke  und wähle **'BEARBEITEN'**


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch die Liste zu blättern und um den erforderlichen Telefonbucheintrag zu ändern



Drücke  (**linke Seite**) um zu bestätigen

Der Zeiger beginnt, an der rechten Seite der Nummer zu blinken. Ändern Sie den Namen mit  (**rechten Seite**) um die Zeichen zu löschen und dann um die Richtigen einzugeben

Drücke  (**linke Seite**) und wähle **'WEITER'**

Der Zeiger beginnt, an der rechten Seite des Namens zu blinken. Ändern Sie den Namen mit  (**rechte Seite**) um die Zeichen zu löschen und dann um die Richtigen einzugeben

Drücke  (**linke Seite**) und wähle **'WEITER'**


Benutze  und  um durch das Melodiemenü zu blättern um einen gewünschten Klingelt. auszuwählen . Wenn Sie durchblättern demonstriert das Telefon die ausgewählte Melodie. Wenn Sie eine VIP-Nummer einstellen möchten, sollten Sie einen speziellen Klingelton auswählen. Der Klingelton sollte anders sein wie die bisherigen. Sie können 9 VIP Klingeltöne mit 9 Nummern verknüpfen

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern


# TELEFONBUCH

## Telefonbucheintrag löschen



Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und um durch das Menü zu blättern und wähle **'LÖSCHEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen


Benutze  und  um durch die Liste zu blättern und um den erforderlichen Telefonbucheintrag zu ändern

Drücke  (linke Seite) um zu **'LÖSCHEN'**



Sie werden aufgefordert um zu **'BESTÄTIGEN ?'**. Drücke  (**linke Seite**) erneut um zu **'LÖSCHEN'**

## Alle Telefonbucheinträge löschen


Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'ALLE LÖSCHEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen


Sie werden aufgefordert um zu **'BESTÄTIGEN ?'**. Drücke  (**linke Seite**) erneut um **'ALLE LÖSCHEN'**

# TELEFONBUCH



## Telefonbuch Status

Das Telefonbuch Status zeigt die Anzahl der Einträge die bereits im Telefonbuch gespeichert sind z.B. 05/50

Drücke 'MENÜ' Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle 'TELEFONBUCH'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'TB STATUS'

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Die Anzahl der Einträge die bereits im Telefonbuch gespeichert sind werden angezeigt

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen 'OK'


# KURZWAHL(MOBILTEIL)



Das Mobilteil hat 4 Kurzwahlspeichertasten. Diese Nummern werden im Telefonbuch gespeichert.


## Kurzwahlnummer erstellen

Drücke die Speichertaste (**M1** bis **M4**) im standby Modus


'NUMMER?' wird angezeigt. Gebe die gewünschte Nummer ein (bis zu 20 Zeichen)



Drücke  (**linke Seite**) um zu bestätigen 'WEITER'

Benutze  und  um durch das Melodiemenü zu blättern um einen gewünschten Klingelton auszuwählen. Wenn Sie durchblättern, demonstriert das Telefon die ausgewählte Melodie.

Drücke  (**linke Seite**) um zu speichern

## Kurzwahlnummer anzeigen

Drücke  im standby Modus

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und um die gewünschte Nummer zu finden. Die Speicherstandardnamen sind **M1** bis **M4**. Man kann etwas hinzufügen, aber Sie können nicht den Standardnamen löschen z.B .M1 kann zu M1: Doctor werden

## Kurzwahlnummer wählen

Im standby Modus, drücke **M1** bis **M4** um mit der gewünschten Telefonkurzwahlnummer zu wählen.

# KURZWAHL(MOBILTEIL)

## Kurzwahlnummer verändern



Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Drücke  und wähle **'BEARBEITEN'**


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch die Liste zu blättern und um den erforderlichen Telefonbucheintrag zu ändern



Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen


Der Zeiger beginnt, an der rechten Seite der Nummer zu blinken. Ändern Sie den Namen mit  (**rechten Seite**) um die Zeichen zu löschen und dann um die Richtigen einzugeben

Drücke  (linke Seite) und wähle **'WEITER'**


Der Zeiger beginnt, an der rechten Seite der Nummer zu blinken. Ändern Sie den Namen mit  (**rechte Seite**) um die Zeichen zu löschen und dann um die Richtigen einzugeben

Drücke  (linke Seite) und wähle **'WEITER'**

Benutze  und  um durch das Melodiemenü zu blättern und um einen gewünschten Klingelton auszuwählen. Wenn Sie durchblättern, demonstriert das Telefon die ausgewählte Melodie. Wenn Sie eine VIP-Nummer einstellen möchten, sollten Sie einen speziellen Klingelton auswählen. Der Klingelton sollte anders sein wie die bisherigen. Sie können 9 VIP Klingeltöne mit 9 Nummern verknüpfen


Drücke  (**linke seite**) um zu bestätigen. Sie können den Vorgang wiederholen und andere Einträge ändern im Telefonbuch oder drücken

# KURZWAHL(MOBILTEIL)



Sie  um in standby Mod. zu gelangen od. warte 30 Sek.

## Kurzwahlnummer löschen



Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**


Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'LÖSCHEN'**

Drücke   (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch die Liste zu blättern und um den erforderlichen Telefonbucheintrag zu ändern

Drücken  (**linke Seite**) um auszuwählen

Sie werden aufgefordert um zu **'BESTÄTIGEN ?'**. Drücke  (**linke Seite**) erneut um zu **'LÖSCHEN'**

# KURZWahl (BASIS)

Dieses Basis-Telefon verfügt über 8 Kurzwahlspeicher-Tasten. Diese Tasten sind Foto-Direktwahl-tasten, wo Sie Ihre Kontaktdaten-Fotos unter dem Plexiglas der Taste anbringen können. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie dazu tendieren Telefonnummern oder Namen zu vergessen. Wenn eine Nummer in einem Speicherplatz gespeichert wurde, müssen Sie nur die Taste drücken, um den Anruf zu tätigen.


## Kurzwahlnummer erstellen

Geben Sie die Telefonnummer ein, die gespeichert werden sollte (maximal 20 Zeichen). Sie können die Nummer bearbeiten in dem Sie die **'LÖSCHEN'** Weichtaste benutzen

Wählen Sie den Standort der Kurzwahlrufnummer durch Drücken der entsprechenden Taste für etwa 3 Sekunden. Ein Bestätigungston ist zu hören.

## Zeige/Wähle eine Kurzwahlnummer

Im standby Modus, drücken Sie die jeweilige Kurzwahl-Standort. Die Rufnummer wird angezeigt.

Drücke die **'WÄHLEN'** Weichtaste oder drücke , die Nummer wird automatisch gewählt. Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie mit dem Hörer sprechen möchten.


# ZUSÄTZLICHE MT & BASEN

Das Mobilteil das mit Ihrer Basis geliefert wurde ist schon an der Basis angemeldet (Fabrikeinstellung). Dies ist als Mobilteil 1 angemeldet. Jedes zusätzliche Mobilteil das Sie erwerben muss an der Basisstation angemeldet werden.



Bis zu 5 Mobilteile können an einer Basisstation angemeldet werden. Das heißt, Sie können interne Gespräche zwischen angemeldeten Mobilteile vornehmen, Sie können eingehende Anrufe Übertragen zwischen den Mobilteilen und Sie können Anrufe überall im Büro / zu Hause annehmen da alle Mobilteile zur gleichen Zeit angerufen werden.

Sie können auch bis zu 4 Basisstationen an jedes Mobilteil anmelden. Dadurch erhöht sich die Reichweite des Telefons, so dass Sie sich zwischen den Telefon-Übertragungsbereichen bewegen können.
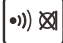
## Neues Mobilteil anmelden


Bevor Sie ein Mobilteil an die Basis anmelden, sollten Sie die  Taste auf der Vorderseite des Sockels für ca. 5 Sekunden drücken und halten und dann loslassen. Der Rest der Anmeldung für ein Mobilteil erfolgt über das Mobilteil.

Drücke **'MENÜ'** Weichtaste um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und um zu **'ANMELDEN'**

Drücke  (**linke Seite**) um auszuwählen

Benutze  und  um durch Basisnamenliste zu blättern

Drücke  (**linke Seite**) um die gewünschte Basis auszuwählen. Das Mobilteil wird nach der gewünschten Basis suchen und die passenden Informationen werden auf dem LCD blinken.

Wenn die Basisstation gefunden und das Mobilteil erfolgreich angemeldet wurde, werden Sie aufgefordert den PIN-Code eingeben (der Standard ist 0000)

Wenn der PIN-Code akzeptiert wird, ertönt der Anmelde-ton und die Basis weist dem Mobilteil eine Nummer zu. Wenn die PIN-Code-Eingabe ungültig ist, ertönt ein Warnton, und das Mobilteil kehrt in



# ZUSÄTZLICHES MT & BASEN

den vorherigen Anmeldezustand zurück.

## Basis auswählen

Ihr Mobilteil kann mit bis zu 4 Basisstationen eingesetzt werden. Siehe Basis auswählen in den Mobilteil-Einstellungen.

**Hinweis:** Um das Mobilteil mit mehr als einer Basisstation zu verwenden, muss das Mobilteil an jede Basis angemeldet werden (siehe den Abschnitt Anmeldung neues Mobilteil)

## Mobilteil abmelden

Eine registrierte Mobilteil kann von einer Basis bei Bedarf entfernt werden. Siehe Mobilteil abmelden in den Basis-Einstellungen.

## Interne Anrufe

Beim Einsatz mehrerer MT an der gleichen Basisstation können Sie interne Gespräche führen und externe Gespräche zwischen den MT verbinden. Führe einen internen Anruf durch


MOBILTEIL: Drücke .  **BASIS:** Drücke 

Geben Sie die gewünschte MTnummer ein (0-5 wird am Mobilteil erscheinen). 0 ist das Basistelefon. (1-5) wird am Basistelefon erscheinen.

**Hinweis:** Wenn eine falsche Mobilteil-Nummer eingegeben wird, d.h. eine, die nicht existiert, wird das Mobilteil einen Warnton abgeben

## Erhalte einen internen Anruf


Das angewählte MT wird klingeln. Die Nummer des anrufenden MT wird an der LCD Anzeige angezeigt ' MT n ANRUF '

**MOBILTEIL:** Um zu antworten, drücke 

**BASIS:** Hörer abheben uns antworten

Um das Gespräch zu beenden,  
MOBILTEIL: Drücke .  **BASIS:** Hörer auflegen

**Hinweis:** Sollte ein externer Anruf währen eines internen Gespräches eingehen, wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Das interne Gespräch

kann durch drücken  beendet werden. Die normale Anruferklingel

# ZUSÄTZLICHES MT & BASEN

wird zu hören sein, drücke  um den Anruf zu beantworten.

## Anrufverbindung zwischen Mobilteilen

Ein ext. Gespräch kann von einem MT zum anderen übertragen werden.

Während eines ext. Anrufes möchten Sie den Anruf verbinden


**MOBILTEIL:** Drücken 

**BASIS:** Drücke .

Ihr externe Anrufer wird in die Warteschleife gestellt

Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein (0-5 werden am Mobilteil angezeigt). 0 ist das Basis Telefon. (! -5) werden auf dem Basistelefon erscheinen


Das angewählte MT wird klingeln. Die Nummer des anrufenden Mobilteil wird auf der LCD Anzeige angezeigt `MT n ANRUF`

**MOBILTEIL:** Um zu antworten, drücke 

**BASIS:** Hörer abheben und antworten.



Falls erforderlich, können Sie nun mit dem angewählten Benutzer sprechen.

So übertragen Sie den ext. Anruf an das angerufene MT

**MOBILTEIL:** Drücke 

**BASIS:** Hörer auflegen

O R

Zum Aufheben der Rufumleitung und zur Rückkehr zum Anrufer, drücke  oder  für einen Telefonbasisbenutzer

**Hinweis:** Bei der Übergabe eines Gespräches, können Sie auflegen bevor das angewählte Mobilteil geantwortet hat. Die Verbindung zw. dem ext. Anrufer und dem angewählten Mobilteil ist abgeschlossen, sobald Sie auflegen.


Wenn das angewählte Mobilteil in einer bestimmten Zeit nicht antwortet, wird der Anruf wieder zurückgeleitet.

# ZUSÄTZLICHES MT & BASEN

## Drei Wege Konferenz Anruf

Wenn Sie beide ein externes Gespräch haben und es ist eine Gegensprechanlage im Gange, können Sie eine Drei-Wege-Konferenzschaltung einrichten.

Während eines externen Gespräches


**MOBILTEIL:** Drücke 

**BASIS:** Drücke 

Ihr externe Anrufer wird in die Warteschleife gestellt

Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein (0-5 werden am Mobilteil angezeigt). 0 ist das Basis Telefon. (! -5) werden auf dem Basistelefon erscheinen


Das angewählte MT wird klingeln. Die Nummer des anrufenden MT wird an der LCD Anzeige angezeigt 'MT n ANRUF'

**MOBILTEIL:** Um zu antworten, drücke 

**BASE:** Hörer abheben und antworten

Der Anrufer kann nun drücken  um den Drei Wege Anruf zu starten

Jeder der beiden internen Mobilteile kann

**MOBILTEIL:** Drücken 

**BASIS:** Wenn Sie den Hörer auflegen, können Sie die Telefonkonferenz jederzeit verlassen.

# ANKLOPFEN

## **Anrufer ID beim Anklopfen**

---

Wenn Sie über einen Anklopfdienst von Ihrer lokalen Telefongesellschaft verfügen, wird die LCD-Anzeige den Namen und die Rufnummer des zweiten Anrufers, während Sie ein Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner führen, anzeigen

Drücke die '**Flash**' Weichtaste um den zweiten Anrufer zu antworten

Wenn Sie mit dem zweiten Anrufer fertig sind drücke '**Flash**' Weichtaste erneut um das Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner wieder aufzunehmen.

**Hinweis:** Wenn Sie einen externen Anruf an ein anderes Mobilteil übertragen haben, wird die Funktion Anklopfen noch über dem zweiten Mobilteil arbeiten.

# ANRUFBEANTWORTER

Auf AN geschaltet, werden ankommende Anrufe durch den Anrufbeantworter nach einer bestimmten Anzahl von Klingeltönen beantwortet (siehe Anrufbeantworter-Einstellung). Wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf entgegennimmt, hört der Anrufer Ihre Ansage. Nach einem kurzen Piepton kann dann eine Nachricht hinterlassen werden.

Ist der Anrufbeantworter auf AUS geschaltet, wird er einen Anruf nach 10 Klingeltönen beantworten. Damit sollen Funktionen mit einer Ferneinschaltung ermöglicht werden.

Ihr AMPLIDECTTM COMBI355 Anrufbeantworter kann betrieben werden entweder mit:



dem Telefonapparat oder

fernbedient von einem externen Telefon

## Einstellen des Anrufbeantwortes An/Aus



Der Anrufbeantworter kann wie folgt An und Aus geschaltet werden:

Drücke 'AB' Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'AB EINSTELLUNG'


Drücke 'WÄHLE' Weichtaste

Drücke 'WÄHLE' erneut und wähle 'AB AN/AUS'

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'AN' oder 'AUS'.

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste.  wird auf der Basis-LCD angezeigt wenn der Anrufbeantworter auf AN geschaltet ist

## Basis benutzen um Anrufbeantworter einzustellen An/Aus



In standby, drücke  Taste um den Anrufbeantworter An oder Aus zu schalten. Der Gerätestatus wird angezeigt.

# ANRUFBEANTWORTER



## Der Anrufbeantworter-Hinweis

Ein Ton wird einmal pro Minute zu hören sein, wenn eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter gespeichert wurde. Sie können wählen, diesen Ton ein-oder auszuschalten.



Drücke **'AB'** Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'AB EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'AB HINWEIS'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'AN'oder'AUS'**

## Ansage 1 und Ansage 2

Bevor Sie den AB nutzen, sollten Sie die Ansage aufsprechen. Es gibt eine Antwort mit aufsprechender Nachricht (Anzeige 1) und eine Antwort nur als Meldung (Anzeige 2). Diese Ansagen sind Ihre Nachrichten auf einen eingehenden Anruf und können bis zu 3 Minuten lang sein.

## Aufnahme Ansage 1

Ansage 1 ist eine herkömmliche Ansage mit der Aufforderung eine Nachricht zu hinterlassen. Die Standard-Ansage ist: "Hallo, Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden, um Ihre Nachricht aufzunehmen, sprechen Sie bitte nach dem Signalton ". Wenn Sie möchten, können Sie Ihr eigene Ansage aufsprechen.

Drücke **'AB'** Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste und wähle **'ANSAGE'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste und wähle **'ANSAGE1'**

Drücke  zur **'AUFNAHME'**

# ANRUFBEANTWORTER

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste

**MOBILTEIL:** Wenn Sie den Ton hören, nehmen Sie bitte Ihre Ansage auf. Wenn Sie fertig gesprochen haben drücken Sie die 'OK' Weichtaste. Wenn Sie länger als 3 Minuten sprechen, stopt die Aufnahme automa. Während der Aufnahme zeigt die LCD 'AUFNAHME' Die neue Ansage wird nach der Aufnahme abges.

**BASIS:** Wenn Sie den Ton hören, nehmen Sie bitte Ihre Ansage auf. Wenn Sie fertig gesprochen haben drücken Sie die 'STOP' Weichtaste. Wenn Sie länger als 3 Minuten sprechen, stopt die Aufnahme automa. Während der Aufnahme zeigt die LCD 'AUFNAHME' Die neue Ans. wird nach der Aufnahme abgesp.

## Aufnahme Ansage 2

Ansage 2 ist nur eine Meldung.

Die Standard-Ansage ist: "Hallo, Ihr Anruf kann zur Zeit nicht entgegen genommen werden, rufen Sie bitte später wieder an. " Wenn Sie möchten, können Sie Ihr eigenes Ansage aufnehmen.

Drücke 'AB' Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Drücke 'AUSWAHL' Weichtaste und wähle 'ANSAGE'

Drücke  und wähle 'ANSAGE2'

Drücke 'AUSWAHL' Weichtaste

Drücke  um 'AUFNAHME'

Drücke 'AUSWAHL' Weichtaste




**MOBILTEIL:** Wenn Sie den Ton hören, nehmen Sie bitte Ihre Ansage auf. Wenn Sie fertig gesprochen haben drücken Sie die 'OK' Weichtaste. Wenn Sie länger als 3 Minuten sprechen, stopt die Aufnahme automa. Während der Aufnahme zeigt die LCD 'AUFNAHME' Die neue Ansage wird nach der Aufnahme abges

**BASIS:** Wenn Sie den Ton hören, nehmen Sie bitte Ihre Ansage auf. Wenn Sie fertig gesprochen haben drücken Sie die 'STOP' Weichtaste. Wenn Sie länger als 3 Minuten sprechen, stopt die Aufnahme automa. Während der Aufnahme zeigt die LCD

# ANRUFBEANTWORTER

'AUFNAHME' Die neue Ans. wird nach der Aufn. abgesp.

## Benutze die Basis um Ans. 1 & Ans. 2 aufzunehmen

Drücke und halte die  oder  Taste am Basisgerät bis die Stimme Sie auffordert. Benutze die  Taste oder 'STOP' um es jeder Zeit zu beenden.


**Hinweis:** Bei der Aufnahme sprechen Sie bitte in Richtung des Mikrofons, das sich am Fuss der Frontplatte der Basis befindet. Halten Sie ca. 20cm Abstand vom Mikrophon um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Wenn Sie Aufnahmen / Wiedergeben / Ansage 1 oder Ansage 2 wieder herstellen, schaltet der Antwortmodus auf den entsprechenden Modus.

## Ausgehende Nachricht überprüfen

Drücke 'AB' Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Drücke 'AUSWAHL' Weichtaste und wähle 'ANSAGE'

Drücke 'AUSWAHL' Weichtaste und wähle 'ANSAGE1' oder Drücke  und wähle 'ANSAGE2' und drücke 'AUSWAHL' Weichtaste


Drücke 'AUSWAHL' Weichtaste und wähle 'ABSPIELEN'

Drücke 'AUSWAHL' Weichtaste

Die aktuelle Ansage1/Ansage2 wird abgespielt. Sie können die 'ZURÜCK' Weichtaste benutzen um zu stoppen oder beenden

## Benutze die Basis um Ansage1 & Ansage2 abzuspielen

In standby, drücke entweder die  oder  Taste an der Basis.

Benutze die  Taste um es jeder Zeit zu beenden.

## Ausgehende Nachricht wiederherstellen


Sie können Ihren persönlich aufgenommenen Ansagetext löschen und die Werkseinstellungsansage wiederherstellen.


Drücke 'AB' Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste und wähle 'ANSAGE'



# ANRUFBEANTWORTER

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste und wähle **'ANSAGE1'** oder drücke  und wähle **'ANSAGE2'** und drücke **'WÄHLE'** Weichtaste




Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'STANDARD'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste

Die LCD zeigt **'BESTÄTIGEN?'**

Drücke **'AUSWAHL'** Weichtaste um die Ansage1/Ansage2 auf Standard wiederherzustellen oder drücke **'ZURÜCK'** um abzubrechen

## Benutze die Basis um ausgehende Nachrichten wiederherzustellen

Im Stand-By, drücke entweder die  oder  Taste an der Basis um Ansage 1 oder Ansage 2 abzuspielen. Drücke  zur Wiederherstellung der Nachricht auf die Standardansage. Ein Bestätigungston ist zu hören. Die Standardansage Ansage1 oder Ansage2 wird automatisch abgespielt.



## Anrufbeantworter-Modus

Sie können wählen, ob der Anrufbeantworter aufnehmen und beantworten soll im Aufnahmemodus (ANSAGE1) oder soll er nur antworten im Modus (ANSAGE2).



Drücke **'AB'** Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Benutze  und  und wähle **'AB EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'WÄHLE ANSAGE'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste

Benutze  und  und wähle entweder **'ANSAGE1'** oder **'ANSAGE2'**

# ANRUFBEANTWORTER

Drücke 'wähle' Weichtaste

## Anrufbeantworter-Einstellungen

Sie können die Anzahl der Klingelzeichen bestimmen bevor der AB auf einen Anruf reagiert. Sie können aus folgenden Möglichkeiten wählen:



- 2 = Anrufe werden nach 2 mal Klingeln beantwortet
- 3 = Anrufe werden nach 3 mal Klingeln beantwortet
- 4 = Anrufe werden nach 4 mal Klingeln beantwortet
- 5 = Anrufe werden nach 5 mal Klingeln beantwortet
- 6 = Anrufe werden nach 6 mal Klingeln beantwortet

• GS (Gebühren sparen) = aktiviert die Gebührensparfunktion  
Im Gebührensparmodus werden ankommende Anrufe nach 5x Klingeln beantwortet, bis die erste neue Nachricht aufgezeichnet wurde. Sobald eine Nachricht aufgezeichnet wurde, antwortet der Anrufbeantworter nach 3x Klingeln. Dies ist nützlich, wenn Sie versuchen, eine Fernabfrage zu starten. Wenn der Anrufbeantworter nach dem 4ten Klingeln nicht antwortet, wurde keine Nachricht aufgezeichnet und Sie können auflegen, bevor Sie für den Anruf bezahlen müssen. Wenn die Maschine nach 3x Klingeln antwortet, wurde eine neue Nachrichten aufgezeichnet.



Drücke 'AB' Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Benutze  und  und wähle 'AB EINSTELLUNG'

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste

Use  and  um durch das Menü zu blättern und wähle 'KLINGEL EINRICHTEN'

Drücke 'WÄHLEN' Weichtaste

Benutze  und  und wähle entweder '2, 3, 4, 5, 6 KLINGELN' oder 'GEBÜHREN SPAREN'



Drücke 'WÄHLE' Weichtaste

# ANRUFBEANTWORTER



## Sprachauswahl der Ansage

Sie können die Sprache auswählen, in der die Stimme auf dem Anrufbeantworter gesprochen werden soll.



Drücke 'AB' Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Benutze  und  und wähle 'AB EINSTELLUNG'

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste


Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'AB SPRACHE'

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste

Benutze  und  um durch die Liste der verfügbaren Sprachen zu blättern. Jede Sprache wird in seiner Muttersprache angezeigt.

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste zur Auswahl der gewünschten Sprache. Ein Bestätigungston ist zu hören.


## Nachrichten abfragen über das Menü

Die Basis- und Mobilteil LED zeigt  wenn Sie eine neue Nachr. haben. Die Basis zeigt auch an, wie viele neue Nachr. eingegangen sind. Bis zu 15 Minuten Nachrichten können aufgezeichnet werden.

Drücke 'AB' Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Drücke  und wähle 'NACHRICHT'

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste um zu bestätigen

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste erneut und wähle 'NEUE NACHR.' oder drücke  und wähle 'NACHR. GESP.'

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste um zu bestätigen

**MOBILTEIL:** Das Telefon zeigt an " Sie haben N neue Nachricht(en) " oder " Sie haben N gespeicherte Nachricht(en) "

Die relevanten Nachr. werden nach und nach abgespielt. Benutze die

# ANRUFBEANTWORTER



Taste um die aktuelle Nachricht zu löschen oder die 'ZURÜCK' Weichtaste um anzuhalten und um zu beenden.


**BASIS:** Das Telefon zeigt an " **Sie haben N neue Nachricht(en)** " oder " **Sie haben N gespeicherte Nachricht(en)** "


Die relevanten Nachr. werden nach und nach abgespielt. Benutze



Taste um die aktuelle Nachricht zu löschen oder die 'ZURÜCK' Weichtaste um anzuhalten und um zu beenden.

## Nachrichten abfragen über die Basis

Um die Nachricht abzuspielen, drücke die  Taste. Das Telefon sagt an, "Sie haben N neue Nachrichten" oder "Sie haben N alte Nachrichten". Die Nachrichten werden nach und nach abgespielt. Während des Abspielens, können Sie flogendes tun:

Drücke  um die momentane Nachricht zu löschen

Drücke  um die vorherige Nachricht zu wiederholen

Drücke  um die nächste Nachricht abzuspielen


Drücke  oder 'ZURÜCK' Weichtaste um anzuhalten und um zu beenden.

Wenn das Abspielen beendet ist kehrt die Maschine in den standby Modus zurück. Alle ankommenden Nachrichten sind gespeichert (es sei denn, Sie haben während der Wiedergabe gelöscht, s.o.), dann werden neue Nachrichte nach den alten aufgezeichnet.

Währen des Abspielens benutze  + oder  - um die Lautstärke einzustellen.

## Anruf aussieben

Sie können eingehende Nachrichten über den Freisprecher hören, wenn sie gerade empfangen werden.

Wenn Sie mit dem Anrufer sprechen möchten, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  am Mobilteil.



# ANRUFBEANTWORTER

## Löschen aller Nachrichten

Drücke 'AB' Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Drücke  und wähle 'NACHRICHT'

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste um zu bestätigen


Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'ALLE LÖSCHEN'

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste um zu bestätigen

Die LCD zeigt 'BESTÄTIGEN ?'

Drücke 'OK' Weichtaste um zu bestätigen oder drücke 'ABBRECHEN' Weichtaste um zu beenden

## Benutze die Basis um alle Nachrichten zu löschen

Im standby, drücke  Taste um alle Nachrichten zu löschen.

## Benutzung des Anrufbeantworters mit Fernabfrage

Bei diesem Anrufbeantworter kann mit Hilfe der Tasten eines gewöhnlichen Tonwahltelefons die Fernabfrage gestartet werden.



## Fernabfrage Code

Ein vertraulicher vierstelligen Code wird benötigt, um Ihre Nachrichten von einem entfernten externen Telefon abzuhören. Der Standard-Fernabfrage-Code ist 0000. Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, diesen Code zu ändern.

Drücke 'AB' Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Benutze  und  und wähle 'AB EINSTELLUNG'

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle 'FERNABFRAGE CODE'

# ANRUFBEANTWORTER

Drücke 'WÄHLE' Weichtaste

Der momentane Fernabfrage Code wird an der LCD angezeigt Geben Sie den neuen Code ein

Drücke 'OK' Weichtaste

## Fernbedienung

Anrufbeantworter anrufen (geben Sie Ihre Telefonnummer ein)

Während Ansage1 und Ansage2 abgespielt wird, geben Sie den Fernabfrage Code ein

Wird der Fernabfrage Code akzeptiert, wird das System eine Folge von Befehlen abspielen. Folgen Sie den Aufforderungen für die Handhabung.

Wenn Sie fertig sind mit dem Zugriff auf den Apparat, legen Sie den Hörer auf

**Sie bekommen nur drei Chancen, den PIN-Code einzugeben. Wenn Sie den PIN-Code dreimal falsch eingeben, wird die Verbindung getrennt.**

## Fernbedienung-Befehle

Befehlfunktionen	
1	Spiele das Hauptmenü
2	Spiele neue Nachrichten
3	Spiele gespeicherte Nachrichten
0	Lösche alle Nachrichten
5	Stelle den Anrufbeantworter auf An/Aus
6	Aufnahme Ansage1 oder Ansage2 (abhängig von der Einstellung)

Wenn Sie 2 oder 3 gedrückt haben um Nachrichten abzuspielen

1	Momentane Nachricht wiederholen
2	Abspielen stoppen
0	Momentane Nachricht löschen

Nachdem Sie ANSAGE1 oder ANSAGE2 aufgenommen haben, drücke # order\* um zu beenden. Die neu aufgezeichnete Ansage wird automatisch abgespielt.

# ANRUFBEANTWORTER

## Aufnahme einer Kurzmitteilung



---

Sie können für den Benutzer des Anrufbeantworters eine Nachricht hinterlassen (bis zu 3 Minuten).

Drücke **'AB'** Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren



Drücke  und wähle **'NACHRICHT'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste um zu bestätigen

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'AUFNAHME MEMO'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste um zu bestätigen

Zeichnen Sie Ihr Memo nach dem Signalton auf. Die Aufnahme stoppt automatisch nach 3 Minuten. Sie können auch bestätigen und beenden durch drücken der **'OK'** Weichtaste. **'AUFNAHME'** wird angezeigt während der Aufnahme

Wenn jemand eine Kurznachricht hinterlässt,  wird an der Mobil LCD angezeigt und  wird an der Basis LCD angezeigt. Die Wiedergabe der Kurznachricht ist wie, als ob eine Anrufbeantworternachricht von einem auswärtigem Anrufer hinterlassen wurde.

## Speicher ist voll

---

Wenn Ihr Speicher voll ist, wird der Anrufbeantworter automatisch auf den ANSAGE2 Modus (nur Antwort) umschalten.

# ANRUFBEANTWORTER



## Anrufbeantworter zurücksetzen

Die Anrufbeantworter-Einstellungen können auf die werkseitigen Standardeinstellungen jederzeit zurückgesetzt werden.

Drücke **'AB'** Weichtaste um den Anrufbeantworter zu aktivieren

Benutze  und  und wähle **'AB EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste

Benutze  und  um durch das Menü zu blättern und wähle **'AB STANDARD'**

Drücke **'WÄHLE'** Weichtaste

Sie werden aufgefordert einen PIN Code einzugeben

PIN Code eingeben (Standard ist 0000)

Drücke **'LÖSCHEN'** Weichtaste. Wenn die PIN korrekt ist, werden alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen wiederhergestellt.



# PROBLEMLÖSUNG (MOBILTEIL)

## Allgemeine Prüfung

- Stellen sie sicher, dass das Telefonkabel und der Adapter richtig angeschlossen und nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Telefonnetz PTT-Buchse an oder bewegen Sie Ihr Telefon an eine andere Steckdose um zu verfolgen, ob der Fehler bei Ihrer Telefongesellschaft oder bei Ihrer PTT-Buchse liegt.
- Vergewissern Sie sich, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist

## Mobilteil ist nicht angemeldet

- Siehe allgemeine Prüfung

## Keine Anzeige

- Siehe allgemeine Prüfung
- Überprüfen Sie ob das Mobilteil eingeschaltet ist

## Keine Verbindung von Mobilteil zur Basis

- Sie sind vielleicht zu weit weg. Gehen sie näher zur Basis

## Mobilteil an der Basis lädt nicht auf

- Stellen sie sicher, dass das Mobilteil richtig aufgelegt ist. Wenn es auflädt, sollte das Batteriesymbol aufladen anzeigen.

## Mobilteil klingelt nicht

- Siehe allgemeine Prüfung
- Stellen Sie sicher ob die Klingellautstärke nicht ausgeschaltet ist

## Kein Ton wenn Sie drücken

- Siehe allgemeine Prüfung
- Überprüfen Sie die Nummer des Mobilteils auf dem LCD-Display z.B. HS1. Wenn diese nicht vorhanden ist, müssen Sie das Mobilteil anmelden (siehe Anmeldung des Mobilteil Abschnitts)

## Ein Warnton ist während eines Gesprächs zu hören

- Die Batterie ist leer. Das Mobilteil muss wieder in die Basis aufgelegt werden um es aufzuladen.

# PROBLEMLÖSUNG (MOBILTEIL)

- Sie sind ausserhalb der Reichweite des zulässigen Bereiches.

## **Keine Nummer wird angezeigt wenn das Telefon klingelt**

- Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um denn Anrufer-ID zu erhalten. Auch wenn Sie einen Anrufer-ID haben, wenn der Anrufer seine Nummer nicht zeigen will (private Nummer), zeigt die Anzeige an 'PRIVAT'. 'AUSSERHALB DES BEREICHS'. Könnte eben so gut bei internationalen Anrufen angezeigt werden.
- Es könnte ein Anruf von einer TK-Anlage sein. Anrufer-ID könnten möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn das Telefon an eine TK-Anlage angeschlossen ist.

## **Konstant kurzes Batterieleben**

- Säubern Sie die Ladekontakte
- Ersetzen Sie die Batterien

## **Nichts passiert wenn eine Taste gedrückt wird**

- Überprüfen Sie ob die Tastensperre ausgeschaltet ist

## **Wenn Sie angerufen werden können, aber nicht selber anrufen können**

bitte überprüfen:

BS Einstell.(ungen) (Wählen)

Wahlverfahr.(en) (Wählen)

Sollte Tonwahl zeigen (nicht Impulswahl)

# PROBLEMLÖSUNG (BASIS)

## **Keine Anzeige**

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Stromadapter richtig angeschlossen und nicht beschädigt ist
- Überprüfen Sie, ob in Ihrer Gegend Stromausfall ist

## **AMPLIDECT™ COMBI355 klingelt nicht**

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefonkabel richtig angeschlossen und nicht beschädigt ist
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Telefonnetz PTT-Buchse an oder bewegen Sie Ihr Telefon an eine andere Steckdose um zu verfolgen, ob der Fehler bei Ihrer Telefongesellschaft oder bei Ihrer PTT-Buchse liegt.
- Es könnten zu viele Kommunikationsgeräte an eine einzige Telefonleitung angeschlossen sein z.B. ein anderes Telefon, Modem oder Faxgerät. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber um Hilfe, bei der Anzahl Ihrer Haus- oder Geschäftsanschlüsse.
- Überprüfen Sie die Lautstärke Ihrer Klingel

## **Kein Freizeichen**

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefonkabel richtig angeschlossen und nicht beschädigt ist
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Telefonnetz PTT-Buchse an oder bewegen Sie Ihr Telefon an eine andere Steckdose um zu verfolgen, ob der Fehler bei Ihrer Telefongesellschaft oder bei Ihrer PTT-Buchse liegt.
- Es könnten zu viele Kommunikationsgeräte an eine einzige Telefonleitung angeschlossen sein z.B. ein anderes Telefon, Modem oder Faxgerät. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber um Hilfe, bei der Anzahl Ihrer Haus- oder Geschäftsanschlüsse
- Überprüfen Sie ob Ihr Wahlmodus richtig eingestellt ist (Ton oder Puls)

## **Störungen in der Leitung**

- Vergewissern Sie sich ob ein Filter bei sämtliche Telefon-Buchsen eingebaut ist, wenn Sie über einen DSL-Anschluss verfügen

## **Keine Anrufer ID wird angezeigt**

- Vergewissern Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber ob Sie über einen Anrufer ID verfügen

# SICHERHEITSINFORMATION

## Allgemein

Verwenden Sie nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzteil.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten, zugelassenen, aufladbaren Akkus.

Öffnen Sie nicht das Mobilteil (außer zum Batteriewechsel im Hörer) oder die Basis. Kontaktieren Sie die Hotline für alle Reparaturen.

Batterien niemals ins Feuer werfen. Es besteht die ernsthafte Gefahr einer Explosion und / oder die Freisetzung von giftigen Chemikalien.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Telefon- oder das Netzkabel, die Schäden verursachen könnten.

Wenn Sie sicher sind, dass das Telefon über einen Monat nicht benutzt wird, dann bauen Sie die Batterien aus.

## Säubern

Trennen Sie das Telefon. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch. Halten Sie die Basis- und Mobilteilladekontakte sauber. Verwenden Sie niemals Polituren oder Reinigungsmittel - diese könnten die Oberfläche oder die Elektronik beschädigen.

## Umweltbedingt

Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.

Achten Sie immer darauf, dass es einen freien Luftstrom über der Oberfläche des Telefons gibt.

Stellen Sie keinen Teil Ihres Produktes ins Wasser und verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung, z. B. Badezimmer.

Setzen Sie Ihr Produkt keinem Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Ziehen Sie Ihr Telefon bei Gewitter aus der TAE-Dose, da Ihr Telefon beschädigt werden könnte. Ihre Garantie gilt nicht für Gewitterschäden.

Das Telefon ist für die Arbeit in einem Temperaturbereich von 5 ° C bis 45 ° C ausgelegt.

# GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc zwei Jahre Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter **www.geemarc.com**. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten Geemarc-Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

**WICHTIG:** IHR KASSENBON IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die Garantie gilt nur für  
Deutschland

**ERKLÄRUNG:** Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt gemäß den erforderlichen Vorgaben und andere wichtiger Bestimmungen der Radio- und Telekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 2014/53/UE und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 2 hergestellt wurde. Das Telefon funktioniert nicht, wenn der Netzstrom weniger als 18 mA beträgt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden : **www.geemarc.com**



**Stromversorgung:** Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230V 50 Hz geeignet. (Eingestuft als "gefährliche Spannung" gemäß der Norm EN60950). Der Apparat hat keinen eingebauten AN-/Aus-Schalter. Zur Unterbrechung der Stromversorgung schalten Sie entweder das Hauptversorgungsnetz ab oder ziehen Sie den Netzstecker heraus. Wenn Sie den Apparat installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass der Hauptschalter gut zugänglich ist.

**Telefonanschluss:** Die im Telekommunikationsnetzwerk vorhandenen Spannungen werden als TNV-3 (Telekommunikationsnetzwerkspannung) nach der Norm EN60950 Standard klassifiziert.

# RECYCLINGANWEISUNGEN

Der elektronische und elektrische Abfall sollte nach seiner Nutzungsdauer an Ort und Stelle auf bestem Wege recyclet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Beim Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter  
**[www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)**

Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**





**geemarc**<sup>TM</sup> Deutschland  
Telecom SA

Produktsupport und Hilfe  
erhalten Sie auf unserer Webseite unter  
[www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)

E-mail : [kontakt@geemarc.com](mailto:kontakt@geemarc.com)

Telefon : 00 49 (0)228 548 89 932