

Bedienungsanleitung Wechsel CeruStop / NanoCare Cerumenfilter

Im-Ohr-Hörgeräte IdOs


CeruSTOP Cerumenschutz

CeruSTOP besteht aus folgenden Teilen:

1. Stäbchen
2. Ausziehhaken
3. Cerumenschutz




Der Cerumenschutz wird in einem kleinen Etui geliefert.

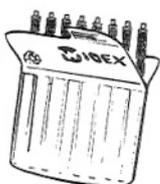

Den gebrauchten CeruSTOP Cerumenschutz herausnehmen


Den kleinen Ausziehhaken in den im Schallauslass angebrachten Cerumenschutz einstecken, und den gebrauchten Cerumenschutz herausziehen.

1. Belüftungskanal
2. Schallauslass
3. Gebrauchter Cerumenschutz

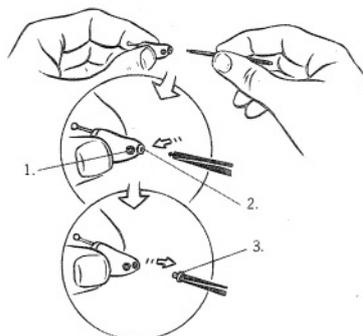

Einen neuen CeruSTOP Cerumenschutz einsetzen

Mit dem anderen Ende des Stäbchens, auf dem der neue CeruSTOP Cerumenschutz angebracht ist, den neuen Cerumenschutz in den Schallauslass einführen.

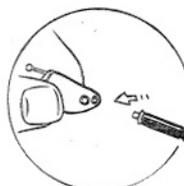

Den Cerumenschutz vorsichtig unter leichtem Druck hineinpressen.



Das Stäbchen danach aus dem Cerumenschutz/ Schallauslass herausziehen. Der neue Cerumenschutz löst sich dabei automatisch vom Stäbchen und bleibt im Schallauslass sitzen.

Nach dem Austausch des Cerumenschutzes den alten Filter samt dem Stäbchen wegwerfen. Ein Cerumenschutzfilter darf nur einmal verwendet werden.

Wichtig: Sollte sich der Cerumenschutz einmal versehentlich vom Hörgerät lösen und im Gehörgang stecken bleiben, so gehen Sie bitte sofort zu Ihrem HNO-Arzt. Versuchen Sie niemals, den Cerumenschutz selbst aus dem Gehörgang zu entfernen.

Falls Sie noch mehr über den CeruSTOP Cerumenschutz wissen möchten, fragen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker.

Wenn Sie Ihr Hörgerät herausnehmen, sollten Sie jedes Mal überprüfen, ob der Schallauslass, der Belüftungskanal oder die Mikrofonöffnung durch Cerumen verstopft sind und diese gegebenenfalls reinigen. Die Positionen des Schallauslasses, des Belüftungskanals oder der Mikrofonöffnung sind von der Anatomie Ihres Gehörganges abhängig. Bitte fragen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker, wie Sie Ihr HörSystem ordnungsgemäß reinigen.



hörwerkstatt


Bedienungsanleitung Wechsel CeruStop / NanoCare Cerumenfilter

Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte HdOs


CeruSTOP Cerumenschutz

CeruSTOP besteht aus folgenden Teilen:


1. Stäbchen
2. Ausziehhaken
3. Cerumenschutz

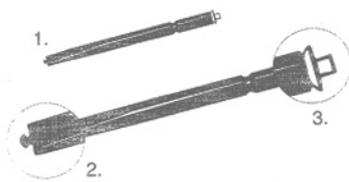


Der Cerumenschutz wird in einem kleinen Etui geliefert.

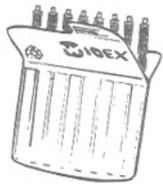


Den Lautsprecher (Hörer) mit der einen Hand festhalten, mit der anderen Hand das Schirmchen vorsichtig ohne Gewalt abziehen.

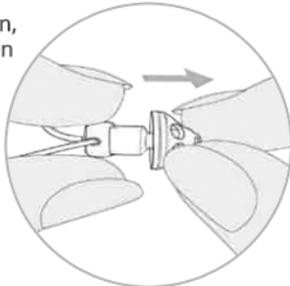


Lautsprecher (Hörer)

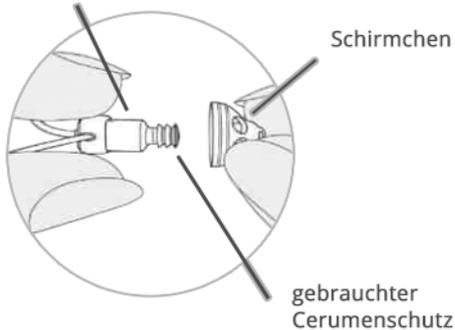

Das Stäbchen mit dem Ausziehhaken in den im Lautsprecher befindlichen Cerumenfilter stecken.

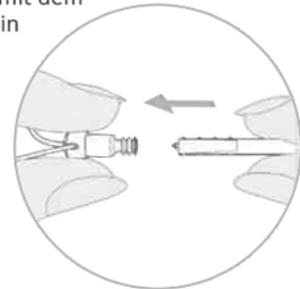

Gebrauchten Cerumenschutz vorsichtig und ganz gerade aus dem Lautsprecher herausziehen. Den Cerumenfilter dabei nicht drehen.

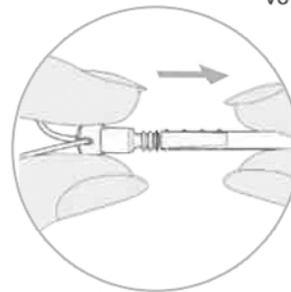

Vor dem Einsetzen des neuen Filters den Lautsprecher mit einem Reinigungstuch säubern.

Das Stäbchen umdrehen und die Seite mit dem neuen Cerumenfilter zum Lautsprecher führen.

Cerumenschutz ganz vorsichtig in die Öffnung des Lautsprechers einsetzen. Das Stäbchen gerade herausziehen. Der neue Cerumenschutz bleibt im Lautsprecher stecken.

Schirmchen auf den Lautsprecher wieder aufziehen.

Nach dem Austausch des Cerumenschutzes den alten Filter samt Stäbchen wegwerfen. Ein Cerumenschutzfilter darf nur einmal verwendet werden.



hörwerkstatt