



## Gebrauchsanweisung für den Bellman Bettvibrator (DE)

---

*Der Bellman Bettvibrator kann für mehrere Produkte angewendet werden, u.a. für das Ladegerät Bellman Visit und den tragbaren Empfänger Bellman Visit, um mit Vibrationen geweckt zu werden.*


### Inbetriebnahme!

1. Den Stecker des Bettvibrators an die angewiesene Steckdose des Ladegeräts Bellman Visit oder des tragbaren Empfängers Bellman Visit anschließen.
2. Die Prüftasten der Sender des Visitsystems drücken und prüfen, dass der Bettvibrator ein Signal abgibt.

Hinweis! Wenn Sie den Bettvibrator an das Ladegerät Bellman Visit anschließen, muss der Taschenvibrator Bellman Visit im Ladegerät stehen, damit der Bettvibrator funktioniert.

### Produktbeschreibung

- 1) Gleitschutz
- 2) Stecker

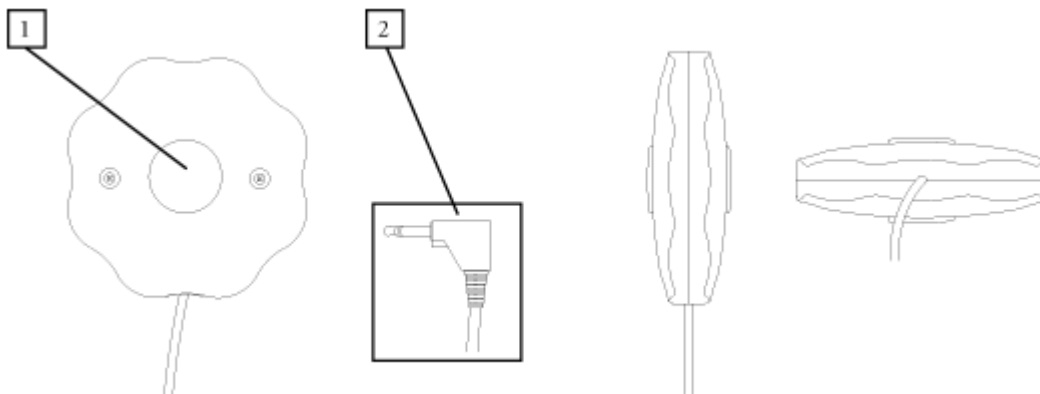

**Address:**  
Bellman & Symfon AB  
Södra Långebergsgatan 30,  
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA  
Sweden

**Our office hours are:**  
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30

**Telephone:** +46 31 682820  
**Fax:** +46 31 682890  
**Homepage:** [www.bellman.com](http://www.bellman.com)  
Sending us company e-mail: [info@bellman.symfon.se](mailto:info@bellman.symfon.se)