


uMic Kurzanleitung

Ihr uMic™ auf einen
Blick

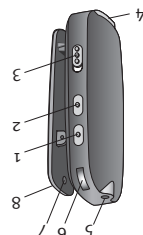

- 1 Lautstärke anheben (+)
- 2 Lautstärke absenken (-)
- 3 EIN-/AUS-Schalter (I/O)
- 4 Ladebuchse (Mini-USB)
- 5 Mikrofonöffnung
- 6 Statusanzeige
- 7 Öse für Tragekordel
- 8 Halteclip

Bedeutung der Statusanzeigen Während des Betriebs:

Ein	2 Sekunden lang grün	Streaming	Konstant blau	Streaming Pause	Blinkt kurz blau	Kopplungsmodus	Blinkt schnell blau
Ein	2 Sekunden lang grün	Streaming	Konstant blau	Streaming Pause	Blinkt kurz blau	Kopplungsmodus	Blinkt schnell blau
Aus	2 Sekunden lang rot	Ladevorgang	Konstant rot	Aus	2 Sekunden lang rot	Stromversorgung und Akku-Ladezustand:	Ein
Aus	2 Sekunden lang rot	Ladevorgang	Konstant rot	Aus	2 Sekunden lang rot	Stromversorgung und Akku-Ladezustand:	Ein
Akku voll geladen	Konstant grün	Akku voll geladen	Konstant grün	Akku voll geladen	Konstant grün	Akku voll geladen	Konstant grün
Batteriewarnsignal	Blinkt zusätzlich zur Statusanzeige kurz rot	Batteriewarnsignal	Blinkt zusätzlich zur Statusanzeige kurz rot	Batteriewarnsignal	Blinkt zusätzlich zur Statusanzeige kurz rot	Batteriewarnsignal	Blinkt zusätzlich zur Statusanzeige kurz rot
uMic im Standby Modus oder ausgeschaltet	Statusanzeige inaktiv	uMic im Standby Modus oder ausgeschaltet	Statusanzeige inaktiv	uMic im Standby Modus oder ausgeschaltet	Statusanzeige inaktiv	uMic im Standby Modus oder ausgeschaltet	Statusanzeige inaktiv




Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada




Unitron Hearing GmbH
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

unitron.com/de

Schritt 1

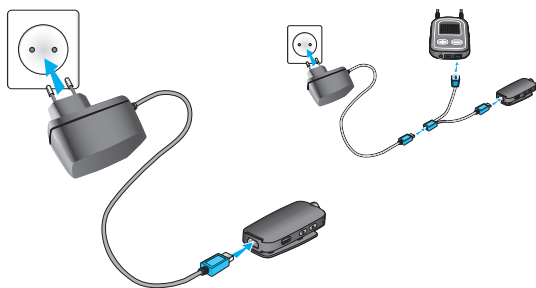

Schritt 2

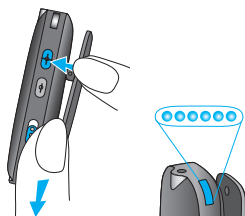


Schritt 3


uDirect 3




2 Sekunden

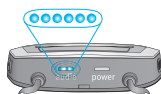

uStream

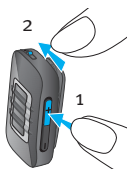

Schritt 4

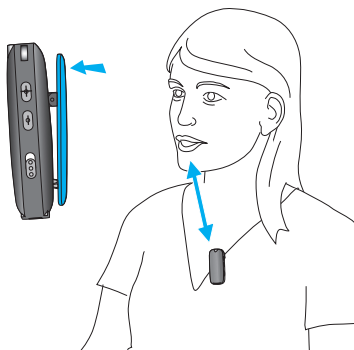


Hörgeräteträger

Sprecher



bis zu 20 Meter
(65 ft)

uDirect 3

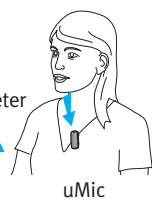

uMic


Hörgeräteträger

Sprecher



bis zu 20 Meter
(65 ft)

uStream

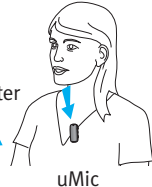

uMic