

uTV 3 Kurzanleitung



Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada




Unitron Hearing GmbH
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

unitron.com/de



14-050 029-5998-01

Ihr uTV™ 3 auf einen Blick

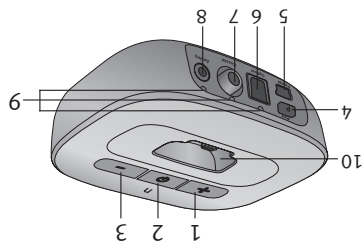


- 1 Lautstärkereglер lauter (+)
- 2 Taste zum Ein-/Ausschalten und Statuskontrollleuchte
- 3 Lautstärkereglер leiser (-)
- 4 Kopplungstaste (+)
- 5 Netzeingang
- 6 Digital Audio (optisch)
- 7 Digital Audio (koaxial)
- 8 Analog Audio (3,5 mm)
- 9 Audiokontrollleuchte
- 10 Auswechselbarer Ladesteckplatz


Ein	Konstant grün	
Eingeschaltet, aber kein Audioeingang	Blinkt langsam grün	• • • • •
Kopplungsmodus	Blinkt schnell blau	• • • • •
Streaming-Modus	Konstant blau	▬
Pause-Modus	Blinkt kurz blau	• • • • •
Test-Modus	Mehrfarbiges Blinken	• • • • •

Bedeutung der Statusanzeigen

Schritt 1

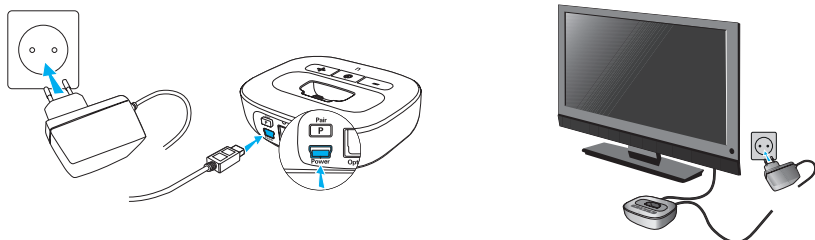


Schritt 2

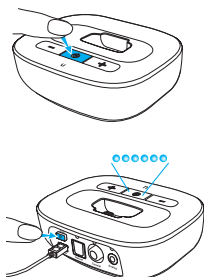


Schritt 3


uDirect 3

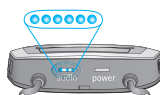

uStream

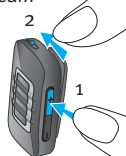

Schritt 4

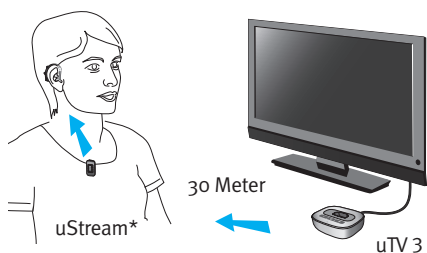

*uDirect 3 ist ebenfalls kompatibel.

Schritt 5

