



Modell: ABH-120

Schnellstartanleitung



Videoanleitungen: <https://bit.ly/bhaccess-video>




support@alango-behear.com



www.alango-behear.com


- Headset

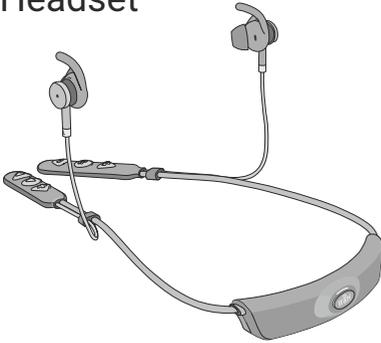


- Ladestation und Kabel




- Ohrbügel (3 Größen)

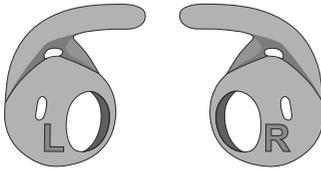

- Windschutzhüllen (2 Paar)

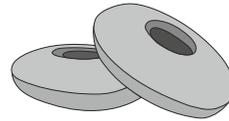

- Ohrstöpsel (verschiedene Arten und Größen)

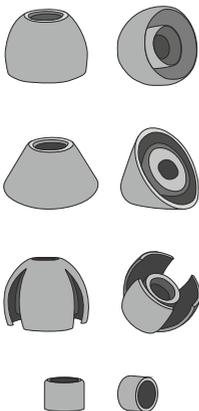

- Reiseetui



B

Smartphone-Anwendung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, personalisieren Sie zunächst Ihr BeHear ACCESS-Headset mithilfe der Hörtestfunktion in unserer Smartphone-Anwendung.



Starten Sie den Personalisierungsprozess, indem Sie die **W&H BeHear**-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen und auf Ihrem Telefon installieren.




Verwenden Sie anschließend die **W&H BeHear**-App, um Ihr BeHear-Headset zu verwalten, anzupassen und Hilfe zu erhalten.

C

Ein- und Ausschalten des Headsets

1. Um BeHear ACCESS einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät vibriert und die LED hellblau leuchtet.
2. Um BeHear ACCESS auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät vibriert und die hellblaue LED erlischt.



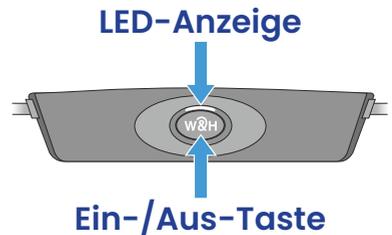


D

Aufladen des Headsets

Zu Beginn sollte der Akku ausreichend aufgeladen sein, um den **Hörtest** durchführen zu können. Laden Sie den Akku anschließend bis zu 3 Stunden auf, bis die LED-Anzeige grün leuchtet.

- Schließen Sie die Ladestation an die Steckdose an und stecken Sie das Headset in die Ladestation.

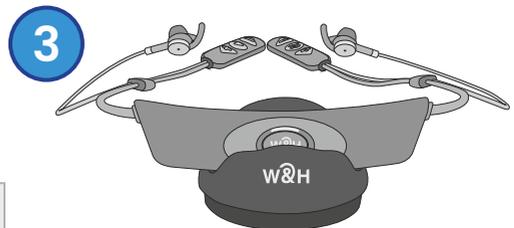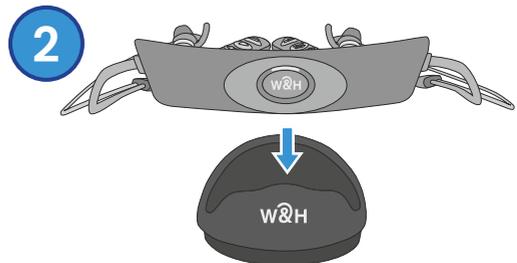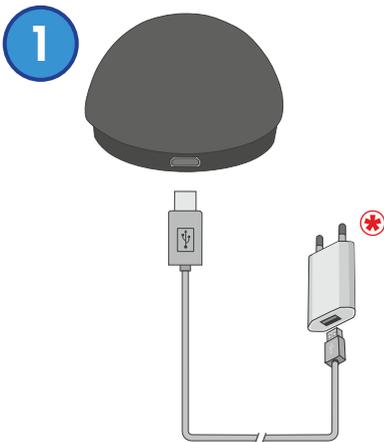


* Wandstecker separat erhältlich

- Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.

Zusätzlicher USB-Ladeanschluss


- Alternativ können Sie das Headset auch direkt über eine Steckdose oder einen USB-Anschluss des Computers aufladen.

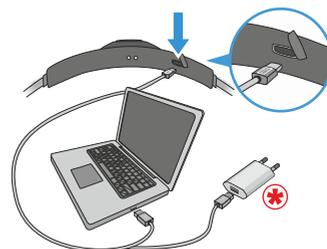

E

Mit dem Telefon verbinden

1. Wenn BeHear eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, bis die LED erlischt.

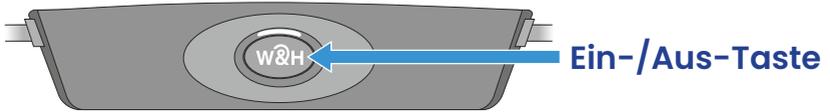






2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 5 Sekunden lang, bis die LED abwechselnd rot und blau leuchtet.
3. Starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen.

Nur für **iOS (iPhone)**: Gehen Sie zu iPhone **“Einstellungen”** >> **“Bluetooth”** und fügen Sie BeHear ACCESS zu **“Meine Geräte”** hinzu.



4. Suchen Sie in der W&H BeHear App Ihr BeHear ACCESS Headset, inklusive seiner Seriennummer, in der Kategorie Verfügbar. Tippen Sie auf dieses Element.
5. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wechselt BeHear ACCESS in die Kategorie Gekoppelt und ein ✓ erscheint.

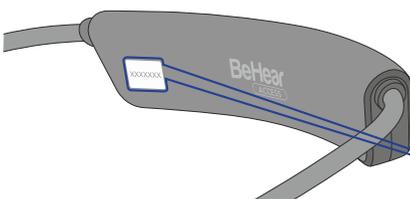

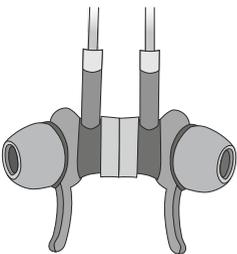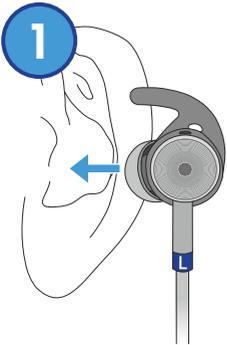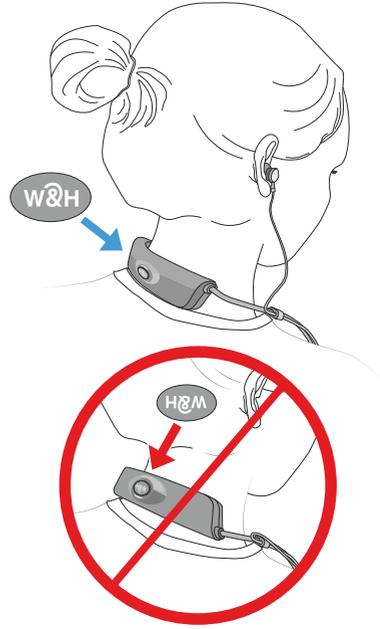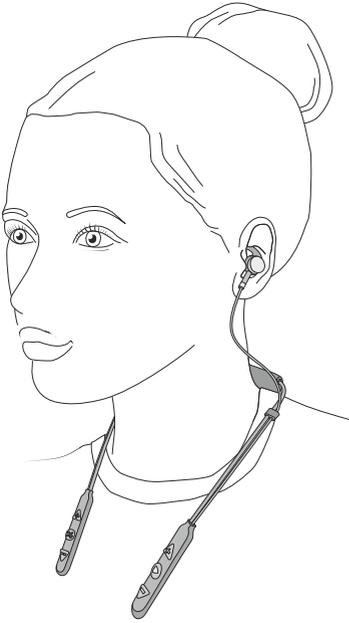

Wenn sie nicht verwendet werden, können die Ohrstöpsel mit Magneten befestigt werden und auf Ihrem Oberkörper ruhen.

Wenn die Standardpasstücke unbequem sind, ersetzen Sie sie. Die Passtücke, die Sie am bequemsten finden, sollten während des Personalisierungsverfahrens im nächsten Abschnitt verwendet werden.*

- Wählen Sie einen Ohrbügel mit bequemer Passform.



Beachten Sie die Symbole "L" und "R" für "Links" und "Rechts" an jedem Ohrbügel.

- Setzen Sie den Ohrstöpsel wieder ein, indem Sie ihn leicht zusammendrücken, um ihn am ovalen Lautsprecher zu befestigen.





- Bringen Sie Schaumstoffabdeckungen zur Reduzierung von Windgeräuschen an (optional).



* Die offenen Ohrstöpsel   können für den Hörtest verwendet werden, aber die resultierende Grafik stellt nicht die wahren Audiogrammwerte dar. Dennoch wird die Leistung des Headsets für diese Passtücke optimiert.


Passen Sie die akustische Leistung des Headsets an Ihre persönlichen Hörvorlieben an.

1. Setzen Sie das Headset auf und setzen Sie die Ohrstöpsel ein.
2. Wählen Sie in der W&H BeHear App **Persönlich** >> **Test**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Hörtest durchzuführen.
4. Speichern Sie die Ergebnisse und wenden Sie sie auf das Headset an.

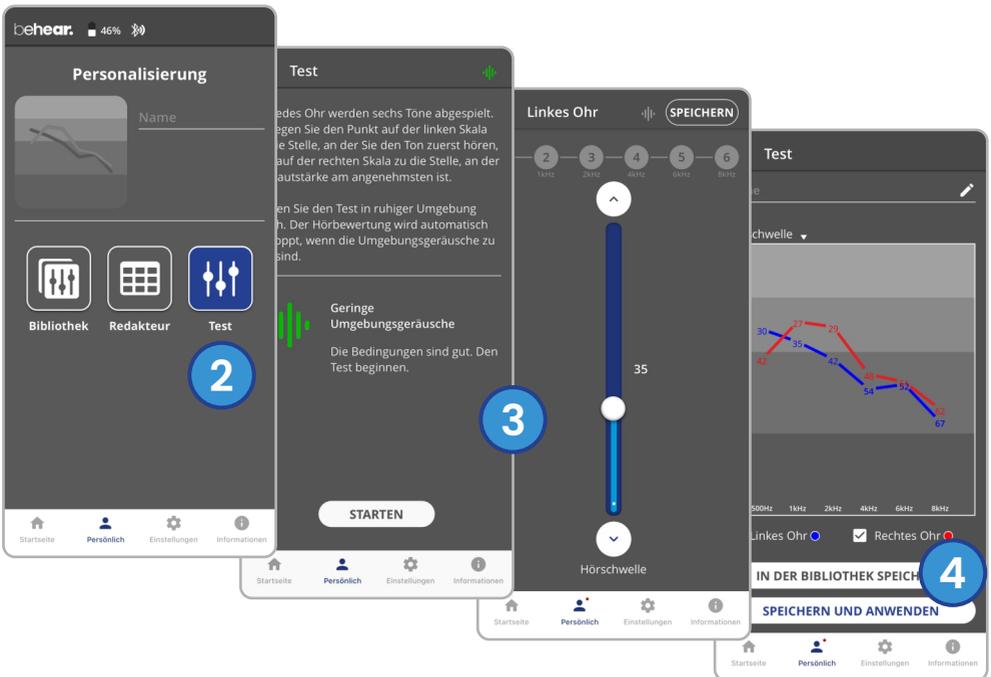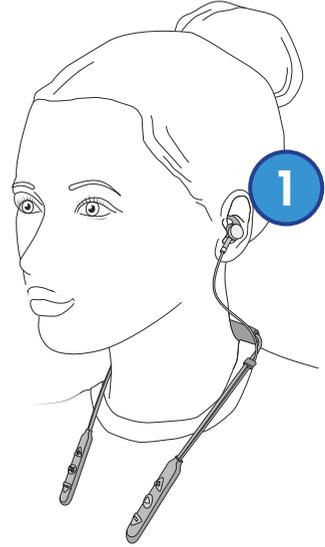

Live-Klänge

Schalten Sie die Hörverstärkung ein und passen Sie die Lautstärke an, wann immer Sie sie brauchen, indem Sie die **RECHTSHAND BEDIENELEMENTE** verwenden.

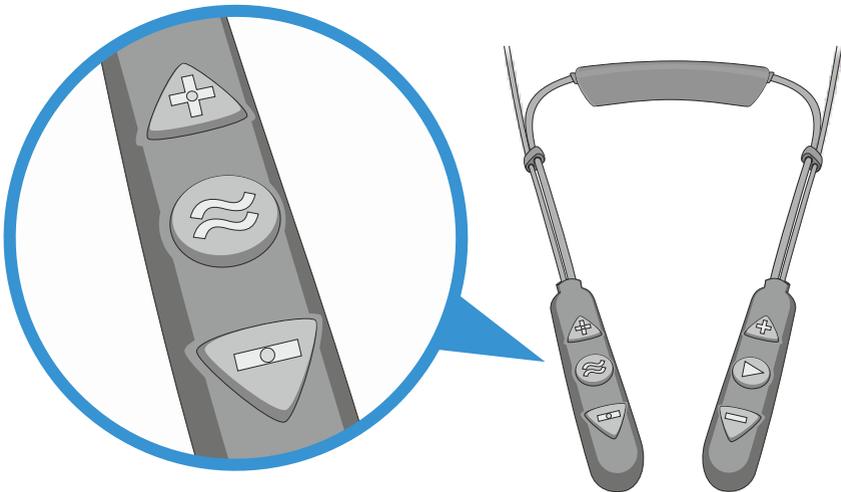

Lange drücken, um die Hörverstärkung ein-/auszuschalten.

Kurz drücken, um durch die Hörprofile zu scrollen.




Erhöhen Sie die Lautstärke.



Verringern Sie die Lautstärke.

Telefonspulen (T-Spule) Empfänger

Aktivieren Sie den T-Spulen-Modus, wenn Induktionsschleifen vorhanden sind und passen Sie Lautstärke mit den **RECHTSHAND BEDIENELEMENTE**.

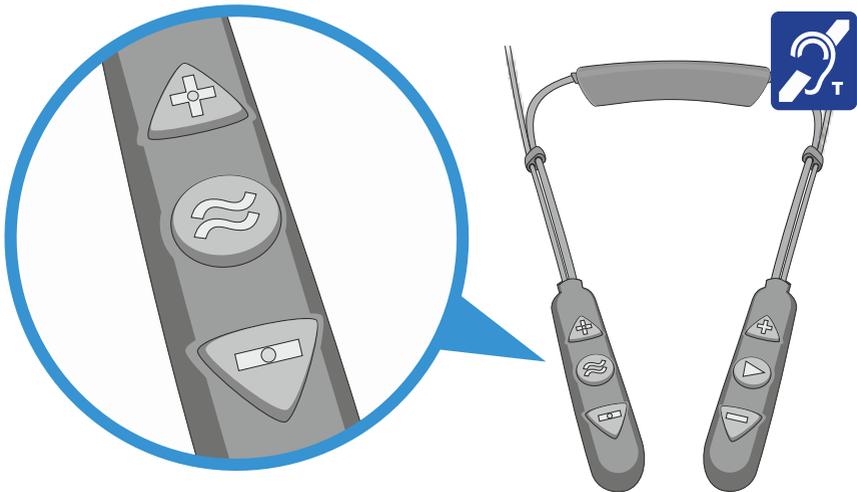

Doppelt drücken, um den T-Spulen-Modus ein-/auszuschalten.



Kurz drücken, um zwischen den T-Spulen-Profilen "Exklusiv" und "Transparent" zu wechseln.




Erhöhen Sie die Lautstärke Telefonspulen (T-Spule) Empfänger.



Verringern Sie die Lautstärke Telefonspulen (T-Spule) Empfänger.

Umgang mit Telefonanrufen

Verwalten Sie Anrufe eines über Bluetooth verbundenen Mobiltelefons mit den **LINKSHAND BEDIENELEMENTEN**.

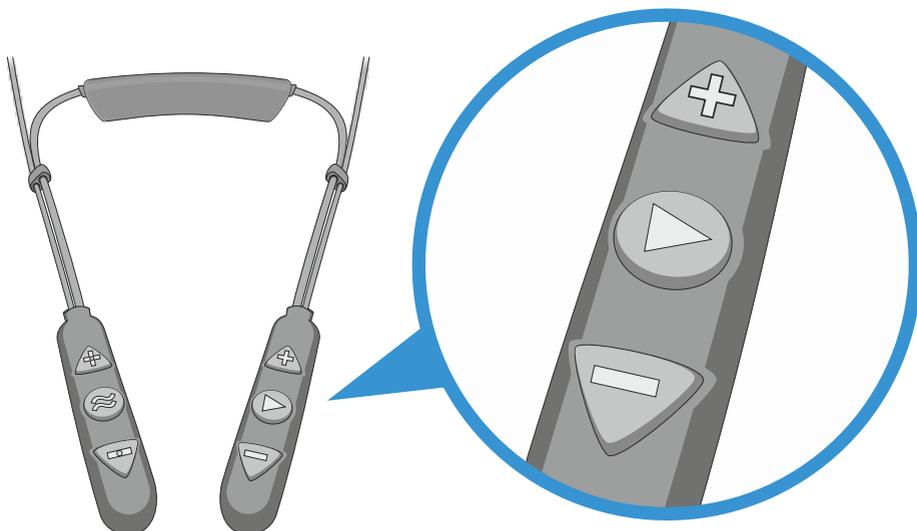

Kurz drücken, um eingehenden Anruf anzunehmen.

Kurz drücken, um den aktiven Anruf zu beenden.



Lange drücken, um eingehenden Anruf abzulehnen.

Doppelt drücken, um die letzte Nummer erneut zu wählen.




Erhöhen Sie die Gesprächslautstärke.



Verringern Sie die Gesprächslautstärke.

Sprache verlangsamen mit EasyListen™

Verringern Sie die Geschwindigkeit der eingehenden Stimme während eines laufenden Mobiltelefonanrufs mit EasyListen, das mit den **RECHTEN STEUERUNGEN** aktiviert wird.

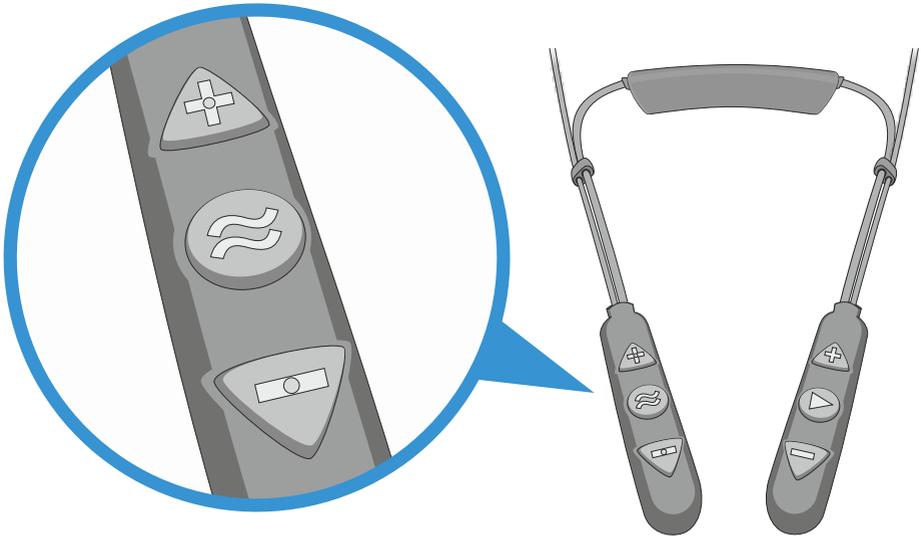

Lange drücken, um EasyListen ein-/auszuschalten.


Das Sprachtempo wird auf Normal eingestellt, wenn EasyListen ausgeschaltet ist.



Wenn EasyListen eingeschaltet ist, **drücken Sie kurz**, um durch die verschiedenen Tempooptionen zu scrollen.

Audiowiedergabe verwalten

Verwalten Sie die Audiowiedergabe von einem über Bluetooth verbundenen Gerät mithilfe der **LINKSHAND BEDIENELEMENTE**.

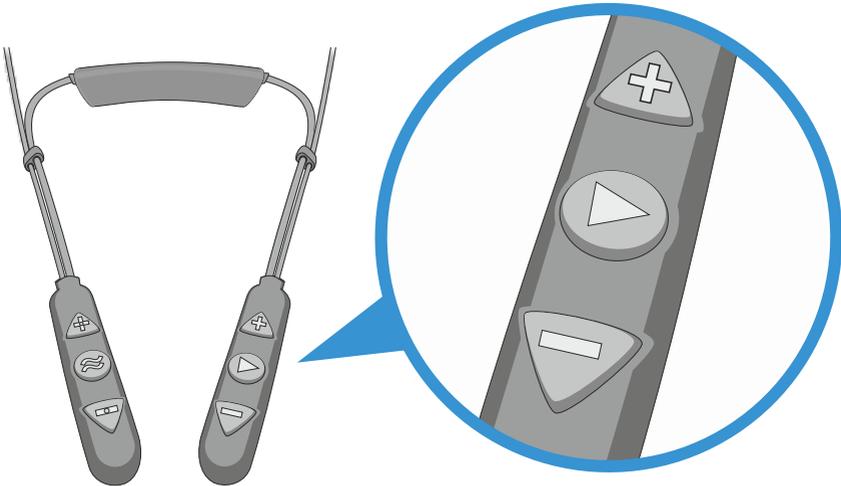

Kurz drücken, um zwischen Wiedergabe/Pause umzuschalten.



Doppelt drücken, um zum nächsten Audiotitel zu springen.

Dreimal drücken, um zum vorherigen Audiotitel zurückzukehren.




Erhöhen Sie die Lautstärke.



Verringern Sie die Lautstärke.

Bleiben Sie sicher und aufmerksam mit ListenThrough™

Bleiben Sie wachsam mit ListenThrough, während Sie mit den **RECHTSHAND BEDIENELEMENTEN**.

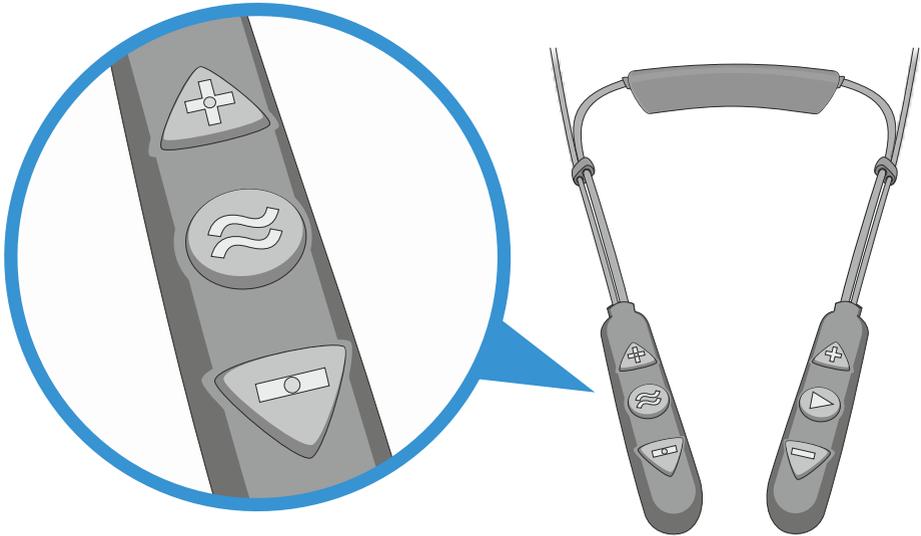

Lange drücken, um ListenThrough ein-/auszuschalten.




Erhöhen Sie die Lautstärke der Umgebungsgeräusche.



Verringern Sie die Lautstärke der Umgebungsgeräusche.

Die LED-Anzeige zeigt den Strom- und Betriebszustand des Headsets an.

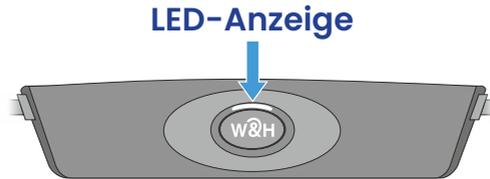

Anzeige

Zustand

Hellblau (1s Blitz)	● Headset ist ein-/ausgeschaltet (umschalten)
Lila, blinkend	⦿ Hörfunktion aktiv
Rot/Blau im Wechsel	⦿ Bluetooth-Kopplungsmodus
Rot, blinkend	⦿ Vom gekoppelten Bluetooth-Gerät getrennt oder Batterie schwach
Rot, dauerhaft	● Laden
Grün, dauerhaft	● Akku voll aufgeladen

Um den Akkustand zu prüfen, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist:

Grün	● Gut > 50 %
Gelb	● Ausreichend > 10 % und < 50 %
Rot, blinkend	⦿ Niedrig < 10 % (muss aufgeladen werden!)

Problem

Anregung

Hörstörungen

Deaktivieren Sie die Telefontöne (Berührungstöne, Tastatureingaben, Benachrichtigungen).

Bluetooth wird oft getrennt

Wenn Sie sich in Reichweite (30 Fuß/10 m) befinden, platzieren Sie das Bluetooth-Gerät auf der rechten Seite Ihres Körpers.

Ausgegrautes Home-Menü in der W&H BeHear App

Headset ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie Abschnitt **E** "Mit dem Telefon verbinden".

Nicht laut genug

Verwenden Sie im Home-Bereich der App die Schaltfläche , um auf das Raster "Sound Tuning" zuzugreifen.

Akku entlädt sich zu schnell

Kontaktieren Sie unser Support-Team.

Unerwartetes Headset-Verhalten

Setzen Sie das Headset zurück, indem Sie es an das Ladegerät anschließen.