

Sonic Alert

Der führende US-Hersteller von optischen Alarmsystemen

Sonic Boom Wecker mit Bettvibration

Modell SBA475ss



BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG - Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf, um darauf zu einem späteren Zeitpunkt zurückgreifen zu können.

Warnhinweis: Um die Gefahr eines Brandes oder Elektroschocks zu vermeiden, das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, muss gewährleistet sein, dass die am Gerät angegebenen Anforderungen der verfügbaren Stromquelle entsprechen, d. h. 120 V~ 60 Hz oder 230 V~ 50 Hz.

- Die Lüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie einer Zeitung, Tüchern, Vorhängen usw. blockiert werden.
- Auf das Gerät keine Quellen offener Flammen wie z. B. Kerzen stellen.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät stellen.
- Das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ausreichende Lüftung stellen.
- Wenn der Netzstecker als Trenngerät verwendet wird, muss das Trenngerät weiterhin betriebsbereit bleiben.



ALLGEMEINE DATEN

Leistungsaufnahme: 120 V ~ 60 Hz, 8 W (USA) ODER 230 V ~ 50 Hz, 8 W (Europa)

Adapterausgang: 9 V ~ 900 mA

Für die USA UL-gelisteter Adapter (Underwriters Laboratories).

Für Europa zugelassener CE-Adapter.

 <p>Der Blitz im Dreieck ist ein Warnzeichen, dass Sie auf die lebensgefährliche Spannung im Geräteinneren hinweist.</p>	<p>VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR: BITTE KEINE GEHÄUSETEILE ENTFERNEN! WENDEN SIE SICH FÜR WARTUNGEN AN IHREN SONIC ALERT-KUNDENDIENST.</p>	 <p>Das Ausrufungszeichen im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf wichtige Anweisungen hinweist, die dem Produkt beiliegen.</p>
---	--	--

WARNHINWEIS: UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

1-JAHR BESCSTRÄNKTE GARANTIE VON SONIC ALERT
Für den Wecker Sonic Boom Modell SBA475ss ist für ein (1) Jahr ab Kaufdatum eine Garantie gegen Herstellungsdefekte bei Materialien und Verarbeitung gewährleistet. Innerhalb dieses Garantiezeitraums wird Sonic Alert den SB 200ss kostenlos reparieren oder nach Sonic Alerts eigenem Ermessen austauschen. Senden Sie den SB 485ss einfach (frankiert) mit einer Kopie Ihres Kassenbelegs als Kaufnachweis an:
Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083, USA.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der Regelung der Federal Communications Commission. Der Betrieb unterliegt der Bedingung, dass dieses Gerät keine schädlichen Interferenzen verursachen kann.


Hinweis: Der Hersteller ist für Radio- oder Fernsehinterferenzen jedweder Art, die durch eigenmächtige Modifizierungen an diesen Geräten entstehen, nicht verantwortlich. Solche Modifizierungen können die Befugnis des Nutzers diese Geräte zu betreiben ungültig machen.

- Bei der Entsorgung der Batterien umweltfreundlich vorgehen.
- Dieses Symbol weist auf eine separate Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte hin.

**BEDIENUNGSANLEITUNG
ANALOG-WECKER MIT BETTVIBRATION
MODELL SBA475SS**

**MERKMALE GEMÄSS ABBILDUNG
OBEN**

- 1) Funktionsschalter
- 2) Dimmer für Hintergrundbeleuchtung Hi/Lo
- 3) Schlummertaste
- 4) Lautstärkeregler
- 5) Blinklichtanzeige
- 6) Klangregler
- 7) Batteriefach
- 8) Zeiteinstellungsregler
- 9) Alarmeinstellungsregler
- 10) Hintergrundbeleuchtung an/aus
- 11) Eingangsbuchse Wechselstrom
- 12) Anschlussbuchse für Vibrationsmelder

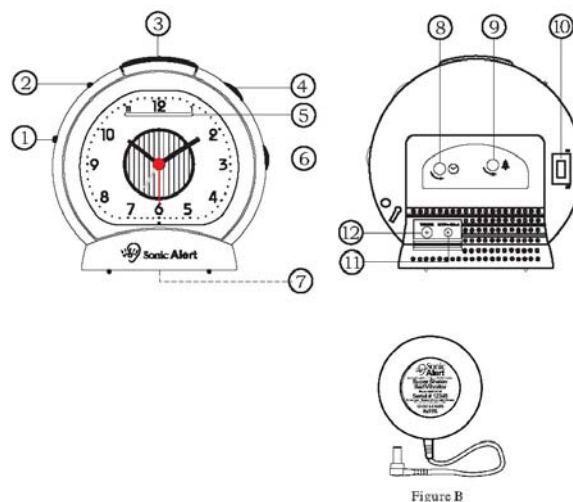

Stromeingangsbuchse 9V Wechselspannung –

Schließen Sie den Wechselstromeingang (11) auf der Rückseite der Uhr an, direkt neben dem VIBRATIONSMELDER-Anschluss.

WICHTIGER HINWEIS: Verwechseln Sie nicht die Stromeingangsbuchse (11) mit der Vibrationsmelderanschlussbuchse (12).

Einstellen der genauen Uhrzeit –

- 1) Drehen Sie den Zeiteinstellungsregler (8) im Uhrzeigersinn, bis die Stunden- und Minutenzeiger die genaue Zeit anzeigen.

Einstellen der Weckzeit

- 1) Drehen Sie den Alarmeinstellungsregler (9) im Uhrzeigersinn, bis der Alarmzeiger die genaue Zeit anzeigt.

Alarm –

Um die Alarmfunktion einzuschalten, schieben Sie den „FUNKTIONSSCHALTER“ (1) auf die Position Ihrer Weckmethoden, Sie können „VIB“ für den Bettvibrator, „BUZZ“ für Tonsignal und „VIB / BUZZ“ für beide auswählen.

HINWEIS: Welche Funktion Sie auch für das Aufwecken auswählen, wird die gleiche Funktion für beide Alarme sein. Wenn der Alarm ertönt, werden das Blinklichtdisplay (4) und die Hintergrundbeleuchtung blinken bis der Alarm angehalten wird.

Schlummereinstellung –

Drücken Sie die SCHLUMMER-Taste (3) wenn der Alarm ertönt. Der Alarm bleibt 4 Minuten lang zum Weiterschlafen ausgeschaltet. Der Alarm wird nach 4 Minuten erneut ertönen.

Alarm ausschalten –

Der Alarm kann ausgeschaltet werden, indem der Funktionsschalter auf „Aus/Off“ (1) gestellt wird.

Lautstärke –

Um die „LAUTSTÄRKE“ (4) zu regulieren, drehen Sie den sich auf der rechten Seite befindlichen Regler.

Tonsignal –

Regulieren Sie das „TONSIGNAL“ (6), indem Sie den auf der rechten Seite befindliche Tonregler auf die gewünschte Klangeinstellung drehen.

Bettvibrator – Siehe Abbildung B

- 1) Schließen Sie den Anschlussstecker des Bettvibrators auf der Rückseite der Uhr an den VIBRATIONSMELDER-Anschluss(12) an.
- 2)
- 3) Um den Vibrator auf Alarm zu stellen, schieben Sie den FUNKTIONS-Schalter (1) auf die gewünschte Position, VIB oder VIB/BUZZ.
- 4) Legen Sie den Vibrationsmelder unter die Matratze oder ein Kopfkissen.

Nachtlicht –

Die blaue Hintergrundbeleuchtung kann mit dem auf der Rückseite der Uhr befindlichen Schalter (10) an oder ausgeschaltet werden. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, kann mithilfe der Schlummertaste (3) die Hintergrundbeleuchtung kurz angeschaltet werden (ca. 8 Sekunden).

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann mit dem Dimmschalter (2) seitlich an der Uhr geregelt werden.

Notstrombatterie –

Um die Notstrombatterieversorgung zu verwenden, können Sie eine alkalische 1,5-Volt AA Batterie in das Batteriefach (7) auf der Rückseite der Uhr einlegen.

Beachten Sie, dass Hintergrundbeleuchtung, Vibrationsmelder und Tonsignal während eines Stromausfalls nicht funktionieren werden. Ihre Alarm- und Zeiteinstellung werden gespeichert bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.